

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **MELOLIN<sup>®</sup>** *Curativo Absorvente não Aderente*

#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

*Melolin<sup>®</sup>* é um curativo que consiste de uma camada absorvente de não tecido, contendo algodão e fibras de poliéster. A camada de baixa aderência, de contato com a ferida, é um filme de poliéster perfurado e a camada de apoio é composta de um material de poliéster não-tecido perfurado.

#### **MODO DE AÇÃO**

*Melolin<sup>®</sup>* absorve exsudato e secreções da lesão e mantém um meio úmido apropriado à cicatrização, além de evitar contatos com a ferida.

#### **APRESENTAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Embalagem</b>
66974932	5cm X 5cm	Caixa c/ 25 unidades
66974933	10cm X 10cm	Caixa c/ 10 unidades
66974939	10cm X 20cm	Caixa c/ 100 unidades
66974940	5cm X 5cm	Caixa c/ 100 unidades
66974941	10cm X 10cm	Caixa c/ 100 unidades

#### **INDICAÇÕES**

Para a proteção de lesões de pele, limpas ou contaminadas, com níveis de exsudato e/ou secreção moderados ou elevados. Para trocas frequentes.

#### **PRECAUÇÕES**

- O curativo *Melolin<sup>®</sup>* não deve ser reutilizado.
- Não use *Melolin<sup>®</sup>* com agentes oxidantes como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois eles podem causar a alteração da estrutura absorvente que compõe o curativo.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

#### **INSTRUÇÕES DE USO**

1. Limpe a lesão conforme procedimentos normais.
2. Selecione o tamanho apropriado de *Melolin<sup>®</sup>*.
3. Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo o excesso de umidade. Excesso de pêlos deve ser tricotomizado para garantir bom contato com a lesão.
4. *Melolin<sup>®</sup>* deve ser posicionado sobre a lesão com a película microperfurada voltada para a superfície da mesma para evitar a aderência do curativo à ferida.
5. Fixe a compressa com um curativo secundário de retenção ou bandagem. Recomenda-se por exemplo:
  - Úlceras venosas: Bandagem compressiva
  - Úlceras de decúbito: Op-Site<sup>®</sup> Flexigrid<sup>®</sup> ou Hypafix<sup>®</sup> Fita Adesiva

## FREQUÊNCIA DE TROCA

*Melolin*® deve ser trocado de acordo com o protocolo de troca de curativos, como se fosse trocar o curativo de gaze convencional. Em lesões contaminadas no entanto, recomenda-se pelo menos uma troca ao dia. No caso de secreção e/ou exsudato, as trocas deverão ser mais frequentes.

## REMOÇÃO

Remova cuidadosamente o curativo secundário de retenção ou a bandagem e só então remova *Melolin*® da lesão. O risco de ruptura do tecido de granulação será mínimo.

As instruções de uso poderão ser obtidas através do site [www.smith-nephew.com/brasil](http://www.smith-nephew.com/brasil) ou o formato impresso pode ser solicitado sem custo adicional, através do e-mail: [sac.brasil@smith-nephew.com](mailto:sac.brasil@smith-nephew.com).

**PRODUT ESTÉRIL POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO  
PRODUTO DE USO ÚNICO – DESTRUIR APÓS O USO  
PROIBIDO REPROCESSAR**

Lote n° / Data de Esterilização / Data de Vencimento : Vide rótulo

Registro ANVISA n°: 80804050012

Responsável Técnica: Daniela Koniossi Hirata – CRF/SP 84321

**FABRICADO POR :**

**Allmed Medical Products Co. Ltd.**

China

**PARA:**

**Smith & Nephew Medical Ltd.**

Hull HU3 2BN

Inglaterra

**IMPORTADO/DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:**

**SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.**

Avenida Nações Unidas, 14171 – 23 Andar, Condomínio Rochaverá Corporate Towers., Torre C – Cristal Tower

CEP 04794-000 – São Paulo/SP

CNPJ: 13.656.820/0001-88

Sac.brasil@smith-nephew.com