

## Debrigel - Instruções de Uso

### INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO DEBRIGEL®

**DEBRIGEL®** é um hidrogel amorfo para tratamento de feridas, composto por hidrocoloides naturais para manter o meio úmido adequado que favorece o processo de cicatrização.

Indicação: **DEBRIGEL®** é indicado para todos os tipos de feridas. Auxilia na reidratação do leito, no desbridamento quando necessário, no tecido de granulação até a epitelização.

#### Modo de Uso:

- Calce luvas de procedimento e descarte-as ao término do curativo.
- Se necessário, umedeça o curativo, antes de removê-lo.
- Remova o curativo e realize a limpeza da ferida conforme protocolo da instituição. Não fricção a lesão e evite força mecânica.
- Seque as bordas com uma gaze limpa.
- Aplique **Debrigel** diretamente dentro da ferida, não exceder a borda da ferida.
- Oclua a ferida com o curativo secundário da sua escolha.
- Troque o curativo a cada 24 horas ou sempre que o curativo estiver saturado.

#### Contra indicações:

Em caso de hipersensibilidade, não utilize ou interrompa o uso e procure orientação médica.

#### Reações Adversas:

Não são conhecidos efeitos colaterais ou reações adversas.

#### Composição:

Água, Carboximetilcelulose, Imidazolidinilureia, Metilparabeno, Propilenoglicol e Propilparabeno.

#### Precauções e Advertências:

Produto uso tópico. Não utilize para perfusão ou injeção. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Se houver suspeita de infecção ou se esta se desenvolver durante o uso de **Debrigel** deve-se instituir terapêutica antibiótica adequada, podendo continuar a utilização do produto, porém a monitoração do processo de cicatrização da ferida deverá estar sob supervisão médica. Não use produto com o prazo de validade vencido ou embalagem violada. Não exceda o nível da pele ao redor da ferida a fim de não macerar as bordas. As bisnagas que tenham tocado na ferida devem ser descartadas após a utilização.

#### Cuidados de Conservação:

O produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (15- 30°C), mantido na embalagem original e bem fechado. Não tocar a embalagem na ferida. O produto possui sistema conservante que o mantém em condições de uso mesmo após aberto.

#### Validade:

Seguindo os cuidados de conservação citados anteriormente, o produto será válido durante o prazo estipulado na embalagem.

#### Fabricado por:

HELIANTO FARMACÊUTICA Ltda.

CNPJ: 04.506.487/0001-30 – Indústria Brasileira

Av. José Abbas Casseb, 135 – São José do Rio Preto/SP

SAC: (17) 3302-1600 E-mail: sac@heliantofarmaceutica.com.br

**Responsável Técnica:**

Dra. Maryster F. Picolin. CRF-SP 27.877 ANVISA: Classe III 80225200017

Lote, Fabricação e Validade: vide marcação.