

# Polihexam Solugel - Instruções de Uso

## INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO Polihexam® Solugel

**Polihexam® Solugel** é um gel contendo poliaminopropil Biguanida (PHMB) que limpa, hidrata e descontamina as feridas para acelerar o processo de cicatrização.

**Indicação:** **Polihexam® Solugel** é indicado para limpeza, hidratação e descontaminação de todos os tipos de feridas, pois promove desbridamento, auxilia na desodorização de feridas e no combate ao biofilme.

### **Modo de Uso: PRODUTO DE USO TÓPICO.**

- Calce luvas de procedimento e descarte-as ao término do curativo.
- Se necessário, umedeça o curativo, antes de removê-lo.
- Remova o curativo e realize a limpeza da ferida conforme protocolo da instituição. Não friccione a lesão e evite força mecânica.
- Seque as bordas com uma gaze limpa.
- Aplicar uma camada de aproximadamente 3 a 5 mm de espessura de **Polihexam Solugel** diretamente sobre a ferida ou nas cavidades, não exceder a borda da ferida.
- Oclua a ferida com o curativo secundário da sua escolha.
- **POLIHEXAM SOLUGEL** pode permanecer na ferida até a próxima troca do curativo. Recomenda-se a troca do curativo em até 72 horas ou sempre que o curativo estiver saturado.

### **Contra indicação:**

Em caso de hipersensibilidade, não utilize ou interrompa o uso e procure orientação médica. Não utilize em cartilagem hialina. Não utilize em associação com tensoativos aniônicos, pois estes podem afetar a conservação. **Polihexam Solugel** não deve também ser misturado com outros produtos de limpeza de feridas, como: sabonetes, pomadas, óleos e enzimas, entre outros. Deve-se assegurar a completa remoção dessas substâncias do leito da ferida com **Polihexam Líquido**.

### **Reações adversas:**

O produto pode causar reações alérgicas como urticárias e exantema (menos que 1 em 10.000). Muito raramente, pode ser registrado imediatamente após a aplicação do produto, um ligeiro ardor na superfície da ferida, o qual irá desaparecer após decorridos minutos.

### **Composição:**

Água Purificada, Cocoamidopropil Betaina, Glicerina, Hidroxietilcelulose e Poliaminopropil Biguanida 0,1%.

### **Precauções e Advertências:**

Produto de USO TÓPICO. Não utilize para perfusão ou injeção. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Não expor os frascos à luz solar direta. Não use produto com o prazo de validade vencido ou embalagem violada. Os frascos que tenham tocado na ferida devem ser descartados após a utilização.

### **Cuidados de Conservação:**

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15- 30°C) mantido na embalagem original e bem fechado.

### **Validade:**

Seguindo os cuidados de conservação citados anteriormente, o produto será válido durante o prazo estipulado na embalagem.

### **Fabricado por:**

HELIANTO FARMACÊUTICA Ltda.  
CNPJ: 04.506.487/0001-30 – Indústria brasileira  
Av. José Abbas Casseb, 135. São José do Rio Preto/SP.  
SAC: (17) 3302-1600 E-mail: sac@heliantofarmaceutica.com.br

### **Responsável Técnica:**

Dra. Maryster F. Picolin. CRF-SP 27.877 ANVISA: Classe IV 80225200022  
Lote, fabricação e validade: vide marcação.