

Tegaderm™ Absorbent

Curativo Acrílico



Absorção e Visualização

MONITORIZAÇÃO DE FERIDAS
SEM TROCA DE CURATIVOS

3M Tegaderm™ Absorbent



Os benefícios do Tegaderm com a vantagem adicional de absorção

Eficiente

- Barreira contra contaminantes externos como bactérias e vírus;
- Elimina odores associados ao uso de hidrocolóides.

Prático e econômico

- Fácil monitoramento da ferida, do exsudato e pele ao redor;
- Elimina a troca desnecessária de curativos;
- Economia de tempo e produto;
- Borda de filme minimiza a probabilidade de perda do curativo.

Versátil


- Pode combinar com outras tecnologias;
- Conformável;
- Confortável para o paciente.

Seguro

- Não desintegra no leito da ferida;
- Baixo potencial para maceração peri-ferida.

O único curativo acrílico que absorve e visualiza com maior tempo de permanência e com baixo risco de maceração

Entenda cada camada

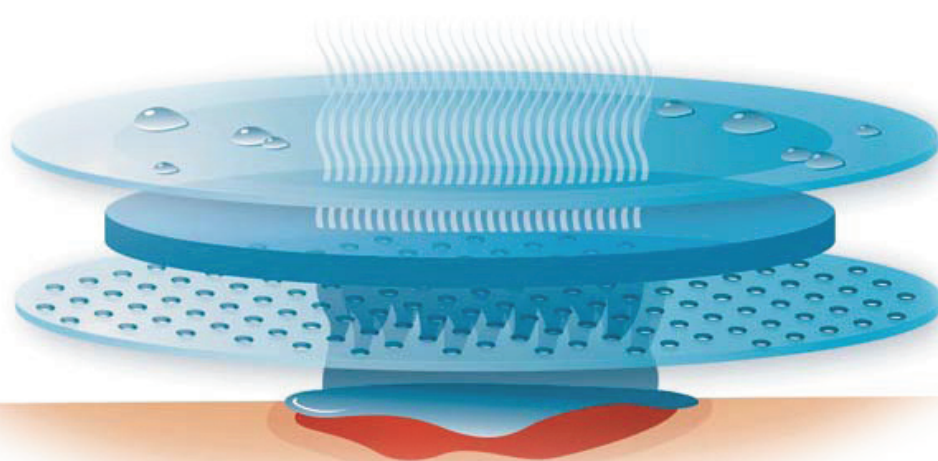

O vapor úmido é liberado através da camada superior do Filme Transparente Tegaderm, semipermeável, à prova d'água, o qual também fornece uma barreira contra contaminantes externos.

Através do processo de difusão, o exsudato é absorvido e mantido pela almofada de polímero acrílico transparente.

O exsudato da ferida se move através da camada inferior de Filme Transparente Tegaderm perfurado, que é coberto com um adesivo para pele úmida.

Indicado para feridas com exsudação

- Skin Tears
- Úlceras por pressão
- Feridas superficiais
- Abrasões
- Queimaduras superficiais
- Áreas doadoras de enxertos
- Incisões cirúrgicas ou laparoscópicas



Curativo primário sobre úlceras por pressão de estágios 2 e 3.



Skins Tears



Cobertura secundária em feridas profundas que requeiram absorção adicional.



Curativo primário para áreas da pele doadas para enxertos com ou sem exsudato.




Úlceras venosas exsudativas.

Siga os passos abaixo para obter resultados consistentes no tratamento

1. Corte o excesso de pelos ao redor da ferida para facilitar a adesão do curativo.
2. Limpe completamente a ferida e a pele ao seu redor.
3. Deixe a pele secar bem antes de aplicar o curativo.
4. Se a pele for muito sensível ou houver exsudação além dos limites da ferida, use o 3M Cavilon™ Película Sem Ardor.
5. Escolha o curativo correto de acordo com o tamanho da ferida. Recomenda-se que a borda da almofada absorvente exceda pelo menos 1 cm do limite da ferida.
6. Os curativos Tegaderm™ Absorbent não devem ser cortados.

Aplicando o curativo

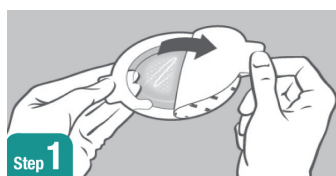

Step 1

Segure o curativo por uma das abas e retire a proteção do adesivo, expondo a superfície adesiva.



Step 2

Segure o curativo pelas abas e centralize-o sem esticar sobre a ferida, com o adesivo para baixo.



Step 3

Aplique o curativo sobre a ferida, alisando-o do centro para as extremidades.







Step 4

Lentamente retire as abas de papel, apertando suavemente as bordas para garantir a aderência.

Remoção

1. Levante com cuidado as bordas do curativo. Se houver dificuldade, cole um pedaço de fita adesiva e levante-o puxando a fita. Tome cuidado especial com curativos sobre incisões cirúrgicas que tenham suturas, grampos ou fechamento adesivo, para que estes não sejam removidos junto com o curativo.
2. Sempre no sentido do crescimento do pêlo, continue puxando cuidadosamente o curativo pelas bordas até que toda a superfície adesiva tenha sido removida da pele.
3. Retire lentamente o curativo da ferida, puxando cuidadosamente no sentido do crescimento dos pelos.

	Código	Tamanho do Pad	Tamanho do Curativo
	90800 Oval	3,8 X 5,7 cm	7,6 X 9,5 cm
	90801 Oval	6,0 X 7,6 cm	11,1 X 12,7 cm
	90802 Quadrado	9,8 X 10,1 cm	14,9 X 15,2 cm
	90807 Sacral	11,75 X 14,3 cm	16,8 X 19 cm

Mercado Hospitalar

Soluções para Assistência ao Paciente
3M do Brasil Ltda.

CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor

Help Line: 0800-0556903
e-mail: helplinehospitalar@mmm.com
www.3m.com.br

