



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

F10 AIR MASSAGE

RM-FM2015A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DETALHES DO PRODUTO.....	7
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
6. TERMOS DE GARANTIA.....	8

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados do produto podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo
 - Flebite
 - Trombose
 - Doenças cardíacas
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza do seu massagador, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano seco para a limpeza. Na parte interna plastificada, use um pano úmido.


3. MODO DE USAR

O massagador pode ser utilizado conectado na tomada ou com pilhas.

a) Instalação das pilhas


Abra o compartimento na parte inferior do controle remoto e coloque as pilhas (4 pilhas AA). Verifique se polaridade das pilhas estão corretas, conforme a imagem abaixo. Após colocar as pilhas, feche o compartimento.

Quando o indicador de tempo do controle começar a piscar, indica que as pilhas estão fracas e precisam ser trocadas.

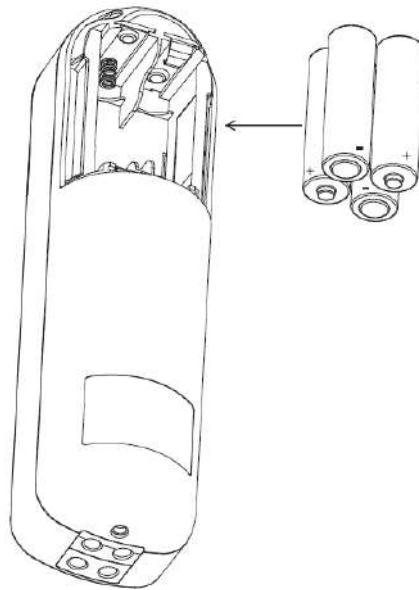

b) Uso com energia elétrica.

Verifique se o controle está SEM as pilhas. Para usar o massagador ligado na energia elétrica, seu massagador precisa estar sem pilhas. Conecte o plug no controle e conecte o adaptador na tomada. Esse produto é bivolt!

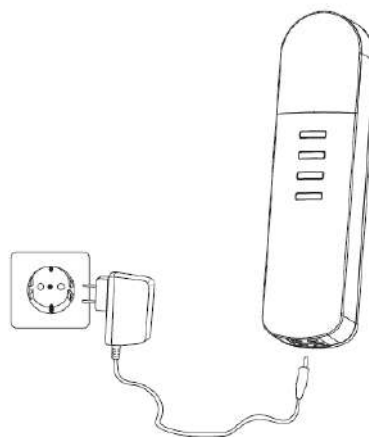

A) Sugestão de Uso

IMPORTANTE

- Não solte o velcro do massagedor durante o uso, isso pode afetar as funções do produto. Faça isso apenas se sentir algum desconforto durante o uso.
- Verifique se as mangueiras de ar não estão dobradas durante o uso
- Não cubra o massagedor durante o uso
- Verifique se as mangueiras estão bem presas no controle
- Não fique em pé enquanto estiver usando o massagedor

COMO VESTIR AS BOTAS



Sugerimos que vista as botas sem utilizar meias ou calças cumpridas para evitar que a pressão de ar machuque as pernas e pés ou danifique o produto.


Na parte superior de cada bota, verifique na etiqueta, qual a bota correta para cada perna. R para direita e L para esquerda.

Para vestir as botas, coloque as pernas na horizontal e ajuste o velcro de forma que fique confortável.

Durante a massagem, mantenha as pernas na horizontal para ter uma melhor sensação de relaxamento.

Conecte as mangueiras de ar no controle e nas botas. Verifique se a mangueira está conectada na saída do controle R na bota R e na saída L na bota L.

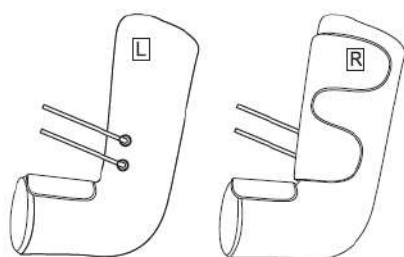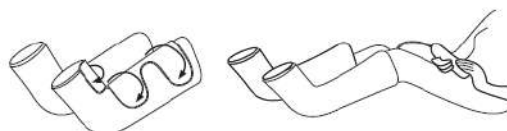

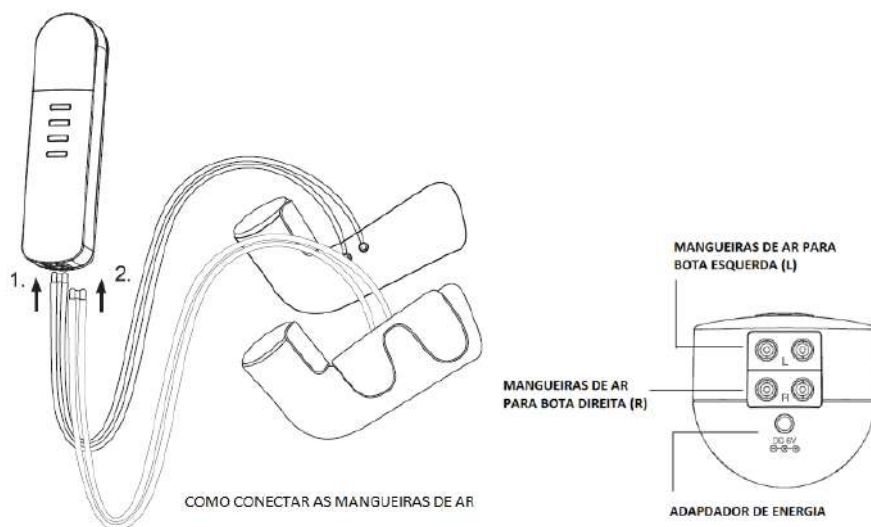

COMO USAR O CONTROLE

ON/OFF: use o botão para iniciar a massagem. Ao ligar o massagador iniciará a massagem no modo 1 de massagem, com intensidade 2 e timer de 10 minutos. Aperte novamente o botão para desligar.

TIMER: aperte o botão para selecionar o tempo de massagem entre 5, 10 e 15. Após o terminar o período de massagem selecionado, o massagador desligará automaticamente.

Sugerimos que seja feita massagem de até 15 minutos. Após esse período você poderá sentir desconforto no local massageado.

MODO DE MASSAGEM: use esse botão para selecionar entre 3 tipos de massagem:

Modo 1: massagem de alta pressão rápida (pé esquerdo e panturrilha, pé direito e panturrilha juntos)

Modo 2: massagem de alta pressão lenta (pé esquerdo e panturrilha, pé direito e panturrilha juntos)


Modo 3: massagem de alta pressão lenta (pé esquerdo e panturrilha direita e depois pé direito e panturrilha esquerda)

INTENSIDADE: aperte para ajustar a intensidade da pressão de ar. Selecione 1 para suave, 2 para média e 3 para intensa.


Depois que este produto for usado e desligado, desconecte as mangueiras de ar do controle desinflar as botas. É necessário cerca de 1 minuto para todo ar sair. Em seguida, tire as botas e dobre-as para o próximo uso. Se este produto não for usado para o tempo de registro, retire as pilhas para evitar danos ao produto.

4. DETALHES DO PRODUTO


BOTA ESQUERDA (L)

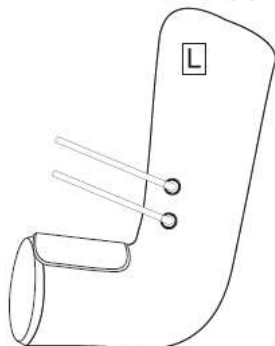


BOTA DIREITA (R)

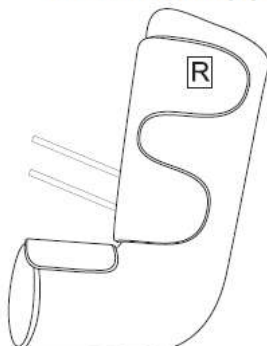

MANGUEIRAS DE AR

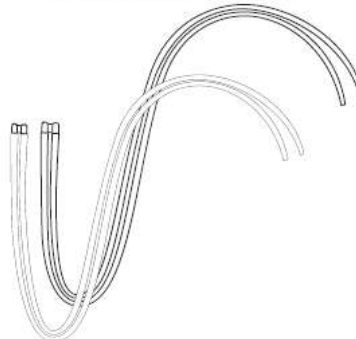

CONTROLE

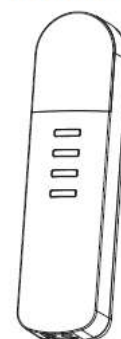

ADAPTADOR DE ENERGIA



BOLSA

FALHA	CAUSA	O QUE FAZER
Falha no produto	Confira se as pilhas estão colocadas corretamente	Instale as pilhas corretamente de acordo com o manual de instruções
	Confira se as pilhas estão carregadas	Substitua por pilhas novas
	Confira se o adaptador de energia está conectado corretamente	Conecte corretamente o adaptador
Falha nos air bags	Confira se as mangueiras de ar estão conectadas corretamente no controle	Conecte corretamente as mangueiras de ar.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 32 x 14,5 x 19 cm

Peso: 1,52 kg

Frequência: 60 Hz

Alimentação: Bivolt ou 4 Pilhas AA

Garantia: 1 ano

Para panturrilhas com cerca de 25 cm a 54 cm de circunferência



Índices de “mmHg” por modo de intensidade:

MODO	NÍVEL	ÍNDICE DE PRESSÃO(mmHg)
1	baixo	115
	médio	138
	alto	173
2	baixo	102
	médio	128
	alto	156
3	baixo	93
	médio	125
	alto	155

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e

acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3- 5 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688