

3M™ Cavilon™ Creme Barreira Durável

Boletim Técnico
Revisado em Agosto/2023



Introdução

O Cavilon™ Creme Barreira Durável forma uma barreira de longa duração que protege a pele de fluídos corporais e incontinência, hidrata e condiciona. Sua fórmula é concentrada, hipoalergênica e com pH balanceado. Permite o uso de produtos adesivos à pele. Reduz o risco de danos associados à incontinência e sintomas relacionados. Hidratante e condicionante para a pele seca. Este produto é seguro para uso em pele intacta e/ou hiperemiada.

Descrição do Produto

O Cavilon™ Creme Barreira Durável é uma emulsão água em óleo, combinação de umectantes e emolientes que proporciona proteção prolongada* contra fluídos corporais provenientes da incontinência urinária e fecal (*resiste até 3 processos de higienização). Contém o terpolímero de acrilato que é responsável por propriedades singulares do produto, como durabilidade e rendimento. Sua formulação é concentrada**, hipoalergênica e com pH balanceado. O produto permite o uso de fitas e dispositivos adesivos.

O Cavilon™ Creme Barreira Durável também proporciona hidratação e condiciona a pele.

Indicações de Uso

1. Proteção da pele íntegra e/ou hiperemiada.
2. Redução do risco de Dermatite Associada à Incontinência (DAI).
3. Hidratação corporal.
4. Indicado para bebês acima de um mês de vida, crianças e adultos.
5. Compatível com 3M™ Cavilon™ Limpador de Pele Sem Enxágue.

Benefícios

- Formulação única com terpolímero de acrilato.
- **Concentrado, aproximadamente 2g são suficientes para proteção da pele da área de fraldas.
- Resistente até 3 processos de higienização, elimina a necessidade de reaplicação frequente.
- Não interfere na capacidade de absorção de fraldas.
- Permite adesão de fitas e dispositivos médicos.
- Permite visualização da pele após aplicação.
- Hipoalergênico.
- Compatível com CHG.
- Não fabricado com látex de borracha natural.
- pH condizente ao da pele.
- Livre de parabenos.
- Sem adição de fragrância.
- Um produto, duas indicações: proteção da pele e hidratação.

Instruções de Uso

1. Limpe e seque a pele.
2. Aplique, suavemente, o creme em quantidade moderada para cobrir toda a área desejada.
3. Se a pele ficar oleosa, muito creme foi aplicado.
4. Em caso de utilização para hidratação corporal é recomendado que os hidratantes sejam aplicados após o banho para ajudar a reter a umidade deixada sobre a pele.

Apresentação

Bisnagas contendo: 28g e 92g.

Observação: Produto não estéril.

Condições de Armazenamento

Armazenar o produto em local arejado, ao abrigo da luz solar. Mantenha o produto fechado após o uso.

Validade

2 anos de validade, a partir da data de fabricação. O produto respeita a validade estabelecida na embalagem, mesmo após aberto, desde que armazenado de acordo com o especificado e em embalagem original.

Registro na Anvisa

Número Anvisa: 80284930354

Produto para Saúde.



Divisão de Soluções Médicas
3M Health Care
Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré - SP
0800 0132333
falecoma3m@mmm.com



/3M.com.br/hospitalar



/3mcuidadosasaudebrasil



/3MCuidadosSaudeBrasil

© 2023 3M. Todos os direitos reservados.
3M e as outras marcas exibidas são marcas
e/ou marcas registradas. Uso não autorizado
proibido.