

3M™ Cavilon™ Película Protetora sem Ardor

Boletim Técnico
Revisado em Agosto/2023



Descrição do produto

3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor (PPSA) é uma solução polimérica que forma uma película uniforme e transparente quando aplicado na pele. O produto está diluído em um solvente não citotóxico, que não provoca ardor e seca rapidamente. Cavilon™ PSSA ajuda a proteger a pele intacta ou lesionada devido à ação irritante de fluidos oriundos de incontinência urinária e/ou fecal, sucos digestivos, efluentes, exsudato de feridas, adesivos, fricção. A película formada é incolor e fornece boa permeabilidade ao oxigênio e ao vapor. Não contém álcool, podendo ser aplicado em peles hiperemiadas e/ou lesionadas.

Benefícios do produto

- Transparente e não requer remoção.
- Não causa ardor por não conter álcool.
- Secagem rápida: aproximadamente 30 segundos após a aplicação do produto*.
- Possui boa permeabilidade ao oxigênio e ao vapor;
- Conforme avaliação do profissional de saúde é aconselhável repetir a aplicação da Película Protetora a cada 12-72 horas.
 - Em condições de incontinência branda (baixo volume e baixa frequência de episódios), a re-aplicação pode ser feita em até 72 horas
 - Em casos extremos com maior volume e frequência de episódio de incontinência (por exemplo, diarreias) e mediante a necessidade de repetidas higienizações, aplicações mais frequentes podem ser necessárias (por exemplo, a cada 12-24 horas).
- Não interfere na capacidade de absorção de fraldas e compressas absorventes.
- A composição da película (terpolímero e plastificante), proporciona a adesão à pele e flexibilidade, permitindo a liberdade de movimentos sem a perda da proteção.

*em ambientes cirúrgicos, permita que o produto seque por, no mínimo, 90 segundos antes utilizar qualquer dispositivo que possa fornecer uma fonte de calor ou ignição. Isto permite que o solvente seque e os vapores dissipem.

Indicações de uso

- Redução do risco de lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais e efluentes (estomias);
- Redução do risco de lesões por fricção e pelo uso constante de adesivos médicos;
- Redução do risco de lesões de pele periférica;
- Formação de película para proteção da pele hiperemiada e/ou com dermatite associada à umidade;
- Indicado para uso em adultos, crianças e bebês acima de um mês de vida.

Contra-indicações

O Protetor Cutâneo 3M Cavilon NÃO deve ser usado:

1. Como a única cobertura em situações que requeiram curativos que evitem contaminação/penetração de microorganismos, como por exemplo em locais de inserção de cateteres intravenosos e áreas com perda parcial ou total de tecidos ou mucosas.
2. Em áreas infectadas da pele.

Advertência

1. Produto **EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL!**
2. O Protetor Cutâneo Cavilon contém hexametildisiloxano que é considerado extremamente inflamável.
3. Cavilon Película Protetora sem Ardor é extremamente inflamável até secar completamente na pele e vapores tenham sido dissipados.
4. Não use Cavilon Película Protetora sem Ardor perto de fogo ou chama, calor, faíscas e fontes de descarga estática.
5. Não utilize o Cavilon Película Protetora sem Ardor perto de fontes de ignição ou dispositivos que produzam calor. Use em área bem ventilada.
6. Os aplicadores de espuma e lenços são embalados individualmente e de uso único. O frasco de spray destina-se ao uso em um único paciente.

Exemplos de indicação



Precauções

Na ocorrência de eritema ou outros sinais de irritação, ou caso os sinais e sintomas persistirem, descontinúe o uso e consulte um médico.

O uso de outros produtos de proteção, unguentos, cremes ou loções podem reduzir significativamente a eficácia do produto.

Técnica de Aplicação

1. A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do Protetor Cutâneo.
2. **Aplicador com espuma na sua extremidade (swab) e/ou lenço (produto estéril):** Aplique uma camada uniforme do filme sobre a área total a ser protegida. Não é necessária sobreposição do produto.
Frasco em spray: segure o frasco a uma distância de 10 a 15 cm da pele e aplique uma camada lisa e uniforme sobre toda a área, enquanto se move o spray em toda a extensão.
3. Se uma determinada área ficar sem aplicação, espere o produto secar completamente (30 segundos aproximadamente*) para depois aplicá-lo no local desejado.
4. Se a Película Protetora sem ardor Cavilon for aplicada em regiões de dobras, ou áreas do corpo onde a pele se toca, certifique-se de que as áreas de contato da pele estejam separadas. Aplique o produto, espere a secagem completa antes de retorná-la à posição normal.

Quando utilizado sob fitas adesivas, curativos ou dispositivos

- Permita que o Protetor Cutâneo seque completamente antes de cobri-lo com o curativo ou outros produtos adesivos.
- A reaplicação do Protetor Cutâneo é necessária cada vez que o curativo ou produto adesivo for removido.

Quando utilizado em ambiente de Bloco Cirúrgico

O uso de Cavilon™ Película Protetora quando usado em ambiente cirúrgico deve ser avaliado e verificado o tempo de secagem do produto, conforme recomendado abaixo, devido “ao risco de incêndio” em sala cirúrgica.

1. A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do Cavilon™.
2. Usando o Cavilon™ na apresentação lenço e ou swab, aplique uma camada uniforme de filme sobre toda a área desejada. O spray não deve ser usado em um ambiente cirúrgico.
3. Se uma determinada área ficar sem aplicação, espere o produto secar completamente para depois aplicá-lo no local desejado.
4. PERMITA QUE O PRODUTO SEQUE POR NO MÍNIMO 90 SEGUNDOS ANTES UTILIZAR QUALQUER DISPOSITIVO QUE POSSA FORNECER UMA FONTE DE CALOR OU IGNIÇÃO. ISTO PERMITE QUE O SOLVENTE SEQUE E OS VAPORES DISSIPEM.

Quando utilizado como protetor contra fluidos corpóreos, incontinência urinária e fecal

- A Película Protetora sem Ardor Cavilon mostrou-se eficiente na proteção da pele contra incontinência por até 72 horas. A duração real da proteção pode variar em função de diferentes tipos e frequência de incontinência e do tipo e frequência da limpeza. Um paciente com episódios ocasionais de incontinência urinária pode requerer reaplicação em até 72 horas.
- Nos casos extremos (diarréias constantes) e com necessidade de higiene/limpeza recorrente, aplicações mais frequentes podem ser necessárias: 12 a 24 horas. Após a aplicação, tampe o pulverizador para evitar dispersão acidental.

Quando utilizado em áreas de pericateres em terapia infusional

1. Antes da aplicação do Protetor Cutâneo Cavilon, prepare o local desejado de acordo com o protocolo da instituição. É necessário que todas as preparações antissépticas sequem completamente.
2. Use o Protetor Cutâneo Cavilon na apresentação espuma (swab)/ lenço para aplicar uma camada uniforme de película na pele que será coberto pelo curativo e / ou dispositivo. Se estiver usando um curativo contendo Gluconato de Clorexidina (CHG), não aplique a película na pele que entrará em contato com o gel de CHG. A apresentação em spray não é recomendada para aplicação no sítio de inserção de cateteres de terapia infusional.
3. Se uma determinada área ficar sem aplicação, espere o produto secar completamente (30 segundos aproximadamente) para depois aplicá-lo no local desejado.
4. Permita que o Cavilon seque completamente antes de cobrir com um curativo adesivo e / ou dispositivo.
5. É necessário repetir a aplicação do Protetor Cutâneo Cavilon sempre que remover os curativos e/ ou produtos adesivos, pois a película de proteção é removido.

Apresentação

1. Aplicador com espuma na sua extremidade do tipo swab: embalado em envelope individual de uso único com 3 ml, estéril.
2. Sachet/Lenço: contendo 1 ml de solução, estéril.
3. Frasco em spray: com 28 ml.

Armazenamento

A fim de obter a melhor eficácia do produto, acondicione-o em temperatura ambiente (15 a 30° C).

Validade informada na embalagem.

Registro para Saúde

Protetor Cutâneo 3M Cavilon (Lenço e Swab):
Registro ANVISA 80284930214

3M Cavilon Película Protetora Sem Ardor (Spray):
Registro ANVISA 80284930340



Divisão de Soluções Médicas
3M Health Care
Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré - SP
0800 0132333
falecoma3m@mmm.com

 3M.com.br/hospitalar

 [/3mcuidadosasaudebrasil](https://www.instagram.com/3mcuidadosasaudebrasil)

 [/3MCuidadosSaudeBrasil](https://www.facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil)

© 2023 3M. Todos os direitos reservados.
3M e as outras marcas exibidas são marcas e/ou marcas registradas. Uso não autorizado proibido.