

Cadeira de Banho

MODELO D50



dellamed
Home

1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho D50.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro da sua cadeira de rodas.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do registro: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço:

Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário

CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

Fabricado por: Foshan Zubon Technology Co., Ltd.

Endereço Fabricante: N.º 1, Floor Two, Building N.º5, Yungang Industry Park, Shilian Shidong, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, China.

Registro da Anvisa: 80795950026



QUEREMOS OUVIR VOCÊ!

Atendimento ao Consumidor:

0800.604.800 8

assistenciatecnica@dellamed.com.br



2. SOBRE O PRODUTO

A cadeira de rodas higiênica para banho D50 Dellamed é ideal para pessoas com dificuldades de locomoção, auxiliando-as no momento da higiene pessoal. A D50 é dobrável, desmontável e, com 4 rodízios giratórios, ela é a opção perfeita para ambientes com espaço reduzido. Seu assento acolchoado removível oferece conforto adicional ao usuário em usos mais longos. Por fim, acompanha comadre e pode ser usado sobre o vaso sanitário.

3. LISTA DE COMPONENTES



 1 Un.	 1 Un.	 4 Un.	 1 Un.	 1 Un.
Encosto	Apoio para Pés	Rodízios	Suporte para Comadre	Chave Allen e Chave de Boca
 1 Un.	 1 Un.	 1 Un.	 1 Un.	 4 Un.
Estrutura da Cadeira	Assento	Almofada do Assento	Comadre	Parafusos dos Rodízios

**Imagens ilustrativas. Alguns componentes podem possuir variações de cor e/ou outros atributos diferentes das apresentadas anteriormente. Contudo, tais variações não impactam na usabilidade e nas características do produto.*

4. MONTAGEM


PASSO 1:

Retire o produto da embalagem com cuidado. Remova o filme plástico, abra a estrutura principal da cadeira de forma que o encaixe do descanso de pés fique voltado para dentro.



PASSO 2:

Encaixe o suporte para comadre na barra traseira da cadeira. Após isso, encaixe a barra da estrutura frontal do assento, pressionando o botão pino click para dentro.

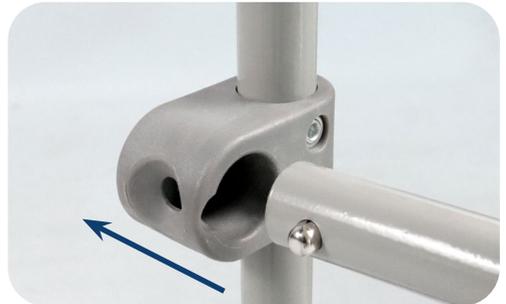

PASSO 3:

Posicione a estrutura da cadeira de pernas voltadas para cima. Trave o freio das rodas frontais para facilitar a montagem. Encaixe as rodas com a perfuração alinhada com a estrutura, coloque o parafuso com sua cabeça virada para a estrutura e, após apertar a porca com a chave de boca de um lado, termine de parafusar o outro lado com a chave allen.



PASSO 4:

Posicione a estrutura da cadeira de pernas voltadas para baixo. Instale o descanso dos pés, posicionando-o nos encaixes plásticos; Então, pressione o botão pino click para realizar o encaixe.

NOTA: Certifique-se de ouvir um clique no momento do encaixe para garantir que o descanso de pés tenha sido instalado corretamente.



⚠ ATENÇÃO

Nunca utilize o produto sem que o descanso para pés esteja devidamente montado.

PASSO 5:

Instale o assento, encaixando-o na barra traseira da estrutura. Após isso, basta movimentar o assento para baixo, cuidadosamente. Por fim, coloque a almofada sob o assento.



PASSO 6:

Para instalar o encosto, encaixe e fixe-o utilizando o grampo de fixação.



PASSO 7:

Por fim, instale a comadre pela parte de trás da cadeira, colocando-a no suporte.

NOTA: Antes de iniciar o uso do produto, verifique se o mesmo está sólido e se todas as peças foram encaixadas corretamente.



5. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Freios: Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.
- Segurança: Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.

Manutenção:

1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificadas.
2. A secagem da sua cadeira D50 é muito importante; Após o banho, remova qualquer resíduo restante da superfície da cadeira.
3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.



*Imagem Ilustrativa

A cadeira de aço carbono D50 é robusta e resistente à umidade. Porém, como todas as cadeiras em aço carbono, ela está sujeita à corrosão. Alguns cuidados adicionais pós-uso são necessários, para que a água não permaneça acumulada na parte interna da cadeira. É importante que seja feita a retirada do encosto das duas laterais, virando a mesma de cabeça para baixo para que a água escorra para fora.

Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado até secar. É importante a retirada da cadeira da área de banho para que a mesma não se mantenha sempre em local úmido.

Com estes cuidados, sua cadeira terá uma vida útil mais longa, garantindo a segurança do usuário.

⚠ ATENÇÃO

Durante o banho, por conta do uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio. Não use o descanso para pés para subir ou descer da cadeira. O mesmo deve ser utilizado apenas para o descanso dos pés enquanto o paciente estiver sentado.

6. DADOS TÉCNICOS

Peso do produto:	9,6 kg
Comprimento total:	840 mm
Largura total:	560 mm
Altura total:	1100 mm
Peso suportado:	150 kg

7. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
- 9 (nove) meses para a estrutura - totalizando 12 (doze) meses de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
- e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada seguindo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item "b" acima informado.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série/lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;
- f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;

- i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
- m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inadequado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
- p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

dellamed



ESCANEE-ME

PARA ACESSAR CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS DELLAMED

Versão 02 – Data 17/04/2023



7 8989521570367