

AI*Prime* dental products

Instruções de Uso

**INSTRUMENTOS
ODONTOLÓGICOS
NÃO ARTICULADOS
CORTANTES AIR**

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS

Instrumento Odontológico Não Articulado Cortante Air AllPrime

Produto não estéril.

Apresentação Comercial:

Os Instrumentos Cirúrgicos encontram-se disponíveis em embalagens primárias de Polietileno, sendo posteriormente acondicionados em caixas de papelão. Disponíveis em embalagens individuais ou kits com 03 instrumentos.

Modelos Comerciais:

Alavanca Cryer esquerda;

Alavanca Cryer direita;

Alavanca Esquerda 3mm linha reta;

Alavanca Esquerda curva redonda 3mm;

Alavanca Esquerda curva redonda 4mm;

Alavanca Direita redonda 4mm;

Alavanca Direita 3mm linha reta;

Alavanca Direita curva redonda 3mm;

Alavanca Flohr esquerda;

Alavanca Flohr direito;

Cureta 204S dupla;

Cureta 204SD dupla;

Cureta Gracey 11-12 Dupla;

Cureta Gracey 1-2 Dupla;

Cureta Gracey 13-14 Dupla;

Cureta Gracey 15/16 Dupla;

Cureta Gracey 17/18 Dupla;

Cureta Gracey 3-4 Dupla;

Cureta Gracey 5-6 Dupla;

Cureta Gracey 7-8 Dupla;

Cureta Gracey 9-10 Dupla;

Cureta H6/7 dupla;

Cureta S5/33 dupla;

Cureta S6/S7 dupla;

Cureta Sickle 23 (foice);

Cureta Sickle 313-314XSI (foice);

Cureta U15 (formato em "U");

Cureta U15/30 dupla (formato em "U");

Descolador Buser;

Escavador G duplo;

Escavador M duplo;

Escavador P duplo;

Esculpidor Heidemann 0;

Esculpidor Heidemann 1;

Esculpidor Heidemann 2;

Esculpidor Holembach 3;

Esculpidor Discóide Cleóide 1/2 duplo;

Esculpidor Discóide Cleóide 3/6 duplo;

Esculpidor Discóide Cleóide 89/91 duplo;

Esculpidor Holembach 3S;

Esculpidor Lecron;

Esculpidor Osteo Mitchell;

Esculpidor para resina anodizado F4;

Esculpidor para resina anodizado F5;

Esculpidor para resina anodizado F6;

Esculpidor Ward 1;

Esculpidor Ward 2;

Cureta 204S Dupla ? Linha Standard;

Cureta Gracey nº 1/2 ? Linha Standard;

Cureta Gracey nº 3/4 ? Linha Standard;

Cureta Gracey nº 5/6 ? Linha Standard;

Cureta Gracey nº 7/8 ? Linha Standard;

Cureta Gracey nº 9/10 ? Linha Standard;

Cureta Gracey nº 11/12 ? Linha Standard;

Cureta Gracey nº 13/14 - Linha Standard;

Cureta McCall nº 11/12 - Linha Standard;

Cureta McCall nº 13/14 - Linha Standard;

Cureta McCall nº 17/18 - Linha Standard;

Descolador Molt nº 9 - Linha Standard;

Esculpidor Discóide Cleóide nº 89/92 - Linha Standard;

Esculpidor Hollenback nº 3S - Linha Standard;

Sonda Milimetrada Nabers

Indicações de Uso:

Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas odontológicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

Modo de Uso:

Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas odontológicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

Composição:

Aço inoxidável AISI 304 no cabo e aço inoxidável 420 nas demais partes do instrumento.

Condições de Armazenamento e transporte:

Os instrumentos devem ser armazenados em local seco e limpo sem

irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

Condições de Manipulação:

Todos os instrumentos devem ser tratados com cuidado, enquanto transporte, limpeza, esterilização e armazenamento. Para informações adicionais sobre manuseio, limpeza, esterilização do instrumental siga as orientações da NBR 14332 de junho de 1999, disponível na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Condições de Esterilização:

Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F (aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado). Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

Advertências:

Os instrumentos devem ser esterilizados e limpos antes da utilização. Também devem ser lubrificados após cada limpeza e desinfecção antes da autoclavagem. Os instrumentos com trava devem ser mantidos destravados durante a desinfecção em autoclave.

Precauções:

Os instrumentos devem ser manipulados somente por profissionais qualificados e habilitados.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de Validade:

Indeterminado

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

Medisporex PVT LTD

Khadim Ali Road - Sialcote, 51310 - Paquistão

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04

88104-785 São José – SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801630006

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870