

**Manual do usuário  
LUVAS****LUVA LÁTEX COM PÓ SSPLUS - PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO****1. Características**

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX COM PÓ/ TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS / AMBIDESTRA/ NÃO ESTÉRIL/ BORRACHA NATURAL/ COR NATURAL

**2. Apresentação:** Tamanhos PP, P, M, G; Box com 100 unidades.

**3. Indicação:** A luva de látex é descartável e não estéril podendo ser utilizada em procedimentos não cirúrgicos como exames, tratamentos médicos e manuseio de dispositivos médicos contaminados para evitar contaminação cruzada entre usuários e pacientes.

**4. Composição:** Látex de borracha natural, carbonato de cálcio, ditiocarbamato, óxido de zinco, fenol polimerizado, enxofre, hidróxido de potássio, amido de milho (pó absorvível padrão USP).

**5. Instruções de uso:**

- 1-Escolha o tamanho de luva adequado para suas mãos;
- 2-Lave as mãos e abra a embalagem;
- 3- Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições;
- 4-Calce as luvas retirando o ar das pontas dos dedos. Comece com sua mão dominante, segurando a luva no punho. Evite tocar em outras regiões da luva para evitar contaminação;
- 5-Para vestir a segunda luva, repita o mesmo processo;
- 6-Com as luvas vestidas, efetue o procedimento desejado.
- 7- Ao retirar as luvas, vire-as do avesso e descarte em local apropriado.

**6. Advertências**

- PROIBIDO REPROCESSAR; PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO.
- NÃO ESTÉRIL;
- ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade ou se a embalagem estiver violada;
- Esse produto não deve ser utilizado na manipulação de agentes agressivos, químicos ou ácidos, líquidos quentes e na presença de fogo.
- As luvas devem ser checadas quanto a presença de rasgos ou furos, antes e depois de colocadas, devendo ser trocadas caso isso ocorra;
- Caso as luvas rasguem durante o procedimento, devem ser removidas e descartadas;

**7. Conservação e transporte:** Manter o produto em sua embalagem sempre fechada; Armazenar em local seco em temperatura ambiente; O produto deve ser protegido da luz ultravioleta como luz solar direta, luz artificial intensa, máquinas de raios-X e outras fontes de ozônio.

**8. Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Fabricante legal: Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited  
Nº. 85 Moo 6, Khuan Thani Sub-district, Kantang District, Trang 92110. Tailândia  
Detentor da Notificação: Qualybless do Brasil LTDA - CNPJ nº 12.472.927/0001-03 - AFE: 8.07.476-6  
Avenida Paranavai, 2381-barracão 05, Parque Industrial Bandeirantes, CEP: 87070-130, Maringá, Paraná, Brasil.  
Farmacêutica Responsável: Millena Balbo - CRF/PR: 39183  
CA: Nº 50.645  
Notificação ANVISA: 80747660008

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 11193-1.