

Características Técnicas

Fixador estéril para cateteres composto por dorso de não tecido de poliéster, não oclusivo, com adesivo de acrilato e hipoalergênico.

Possui fenda central para saída dos equipos e extensores e duas tiras extras para estabilização do hub do cateter. Adapta-se facilmente ao contorno anatômico. Produto não fabricado com látex de borracha natural. Medida: 5cm x 7,4cm. Tiras: 12mm x 7,4cm



Indicações de Uso

Cobertura estéril para fixação e estabilização de cateteres.

Tempo de Permanência

Necessário realizar a troca se estiver sujo, solto, úmido, com a integridade comprometida ou conforme protocolo da instituição.

Instruções de Uso

Preparo do Sítio de Inserção

Realizar a tricotomia local se necessário, com tricotizador elétrico ou realizar a tonsura dos pelos. O uso de lâmina de barbear não é recomendável devido ao potencial de lesões de pele, contribuindo dessa forma com o aumento da colonização bacteriana local;

Usar o antisséptico de acordo com normas estabelecidas pela instituição, aplicar protetor cutâneo se necessário aguardar espontaneamente a secagem das soluções aplicadas;

O local deverá estar sempre limpo e seco para a aplicação do curativo.

Aplicação

- 1 Destaque as duas tiras laterais da parte principal da cobertura.
- 2 Estabilize o canhão do cateter com uma das tiras extras.
- 3 Remova o liner da parte central do curativo.
- 4 Aplique-o sob o cateter, começando a aplicação pelo canhão até que todo o sítio de inserção esteja protegido.
- 5 Realize pressão digital suavemente sobre toda a cobertura para uma melhor adesividade.

- 6 Retire o liner das abas do recorte central e fixe-as passando-as por baixo dos extensores, para garantir a sua acomodação.
- 7 Por fim, utilize a segunda tira extra para reforçar a estabilização do hub cateter e/ou extensores.



Remoção

Para retirar o 3M™ IV Fix™ é necessário realizar o procedimento exatamente ao inverso. Remova lentamente a tira de estabilização segurando as extensões do cateter. Apoie a pele e o cateter para minimizar o deslocamento.

Remova lentamente a cobertura até a retirada completa, soltando-o da pele no sentido do crescimento dos pêlos, buscando evitar traumas cutâneos. Posteriormente remova a tira de estabilização do canhão do cateter.

Validade

2 anos à partir da data de fabricação.

Condições de Armazenamento

Armazenar em local limpo, seco, ao abrigo de luz solar e à temperatura entre 15 e 30° C.

Não utilize o produto fora do prazo de validade. O fixador não deve ser reesterilizado. A esterilidade do curativo é garantida a menos que sua embalagem individual sofra danos.

Registro ANVISA

Número: 80284930185

Código 3M

Descrição	Tamanho	Quant./Caixa
3522B - HB004244164	5 cm x 7,4 cm	100

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com
Divisão Soluções Médicas
3M Health Care
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré/SP



facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil



instagram.com/3mcuidadosasaudebrasil



3m.com.br/hospitalar

