



INSTRUÇÕES DE USO

Produto:

Fio de Nylon Agulhado Shalon

Fio de Sutura de Nylon Agulhado Sertix

Nylon sem Agulha Shalon

Fabricado e distribuído por:

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

Versão:

01



FIO DE NYLON AGULHADO SHALON

FIO DE SUTURA DE NYLON AGULHADO SERTIX

NYLON SEM AGULHA SHALON

DESCRIÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Nylon Agulhado e sem Agulha** são de origem sintética, fabricados a partir da extrusão de poliamida 6 (PA 6.6). É um material biologicamente compatível, bem tolerado pelo organismo, monofilamentar, de alta resistência e fácil manuseio. A hidrólise progressiva pode resultar em perda gradual da força tênsil “in vivo”. Reação tecidual inflamatória aguda mínima. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno ou Cobalto. Classe II e IV.

APRESENTAÇÃO

Os fios cirúrgicos de **Nylon Agulhado e sem Agulha** possuem coloração incolor ou preta. Os fios cirúrgicos de Nylon Incolor são comercializados em caixas com 24 envelopes, sendo que cada envelope contém 1 fio de sutura agulhada no tamanho de 45 ou 75cm e os fios de Nylon Preto são comercializados em caixas com 12 ou 24 envelopes, sendo que cada envelope contém 1 ou 3 fios de sutura com ou sem agulha, dependendo do item, no(s) tamanho (s) de 18,36, 45, 75,150 ou 240cm. As agulhas apresentam diversos tamanhos e curvaturas. O diâmetro dos fios varia segundo os números cirúrgicos de 10-0 a 2. O produto possui prazo de validade de 5 anos a partir da data de esterilização.



INDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos de **Nylon Agulhado e sem Agulha** são indicados para aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos ginecológicos, obstétricos, oftalmológicos, vasculares e cuticulares.

CONTRAINDICAÇÕES

Os fios cirúrgicos de **Nylon Agulhado e sem Agulha** são contraindicados em procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas.

INTRUÇÕES DE USO

Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

CUIDADOS

- Este produto deve ser utilizado somente por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas;
- Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material;
- Usar técnicas assépticas;
- Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada;
- O produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único;
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina;
- Não utilizar se a embalagem estiver molhada ou danificada;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico;



- A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- PRODUTO DE USO ÚNICO;
- NÃO REESTERILIZAR;
- ESTÉRIL;
- DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS.

CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- Recomenda-se armazenar o produto em temperatura de 20°C a 30°C e umidade relativa do ar entre 40 a 60%;
- Conservar os produtos ao abrigo da luz solar direta, livre de poeira, umidade intempéries, e em sua embalagem original;
- Transportar em veículos fechados que protejam o produto de sol e chuva.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR

Shalon Fios Cirúrgicos Ltda

CNPJ nº 33.348.467/0001-86

Endereço: Av. Hermógenes Coelho, 3523 – Alto da Boa Vista.

São Luís de Montes Belos – GO – CEP. 76056-000

Farmacêutica Responsável:

Kátia Regina do Nascimento Dias Policarpo - CRF-GO 11.307

Registro ANVISA nº: 10243410009 (Nylon Agulhado Shalon), 10243410022 (Nylon Agulhado Sertix); 10243410041 (Nylon sem Agulha).

VENDAS

Av. C-255 Nº 270, Edifício Centro Empresarial Sebba,

Salas: 601/603 Nova Suíça – Goiânia – GO – CEP: 74280-010

SAC.: (62)98191-9111 Vendas: (62)3259-4546.

E-mail: vendas@suturas.com.br

Site: www.suturas.com.br