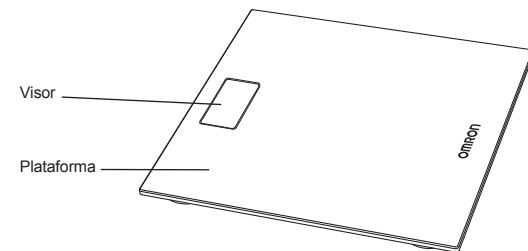


**OMRON®**

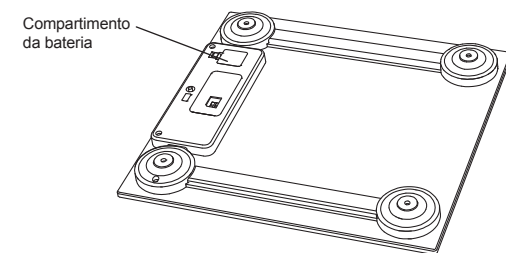
Balança digital

**HN-289**

Vista superior



Vista inferior



Obrigado por ter adquirido a balança digital OMRON. Antes de utilizar esta balança pela primeira vez, leia cuidadosamente este manual de instruções e utilize a balança de forma segura e adequada. Guarde este manual em um local acessível para consulta futura.

Vea el reverso para instrucciones en español.

**Notas sobre segurança**

Os símbolos utilizados e as respectivas definições são as seguintes:

**⚠ ATENÇÃO:** A utilização incorreta poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**⚠ CUIDADO:** A utilização incorreta poderá resultar em danos físicos ou materiais.

**⚠ ATENÇÃO:**

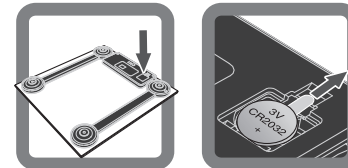
- Nunca comece dietas ou exercícios terapêuticos sem consultar um médico ou especialista.
- Não utilize a balança em superfícies escorregadias, como chão molhado.
- Mantenha a balança fora do alcance das crianças.
- Não salte ou pule em cima da balança.
- Não utilize a balança quando estiver com o corpo e/ou os pés molhados.
- Não pise na borda ou na área do visor da balança.
- As pessoas com incapacidades ou debilidades físicas devem ser sempre assistidas por outra pessoa ao utilizarem a balança. Apoie-se num corrimão ou objeto semelhante para se colocar na balança.
- Se uma bateria vazar e o fluido da mesma respingar nos seus olhos, pele ou roupas, enxague imediatamente com água limpa. Isto pode causar cegueira e outros ferimentos. Consulte um médico para obter ajuda.
- Não coloque os dedos nas ranhuras ou no interior da balança.
- Apenas para uso interno.
- Não utilize para quaisquer outros fins que não sejam a pesagem corporal.

**⚠ CUIDADO:**

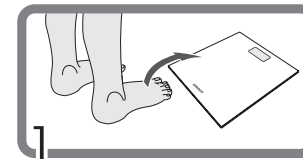
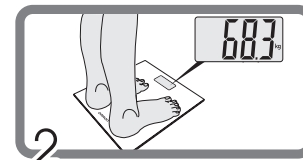
- Aprovado apenas para utilização com seres humanos.
- O vidro da balança pode ser escorregadio, tenha cuidado para evitar quedas.
- Limpe sempre a balança antes das pesagens, quando a mesma tiver sido utilizada por pessoa com problemas de pele nos pés.
- Não armazene em locais expostos a produtos químicos ou vapores corrosivos.
- Leia cuidadosamente o presente manual de instruções antes da utilização e para futura informação sobre funções individuais.
- Não coloque a balança contra a parede. Poderá provocar ferimentos e avaria do aparelho.
- Não desmonte, conserte ou altere a balança.
- Não utilize baterias não especificadas para esta balança. Não insira a bateria com a polaridade invertida.
- Substitua imediatamente a bateria usada por uma nova.
- Descarte a balança e as baterias de acordo com as regras locais de descarte de dispositivos / acessórios eletrônicos.
- Quando não for utilizar a balança durante um longo período de tempo (aproximadamente três meses ou mais), retire a bateria.
- Esta balança destina-se apenas para uso doméstico. Não se destina para uso em hospitais ou outras instalações médicas. Não cumpre os padrões de qualidade necessários para uso profissional.
- Não use o aparelho em superfícies macias, como tapetes - os resultados podem ser incorretos.
- Não use celulares e outros dispositivos que geram fortes campos elétricos ou eletromagnéticos próximos ao dispositivo.

**Ativação da bateria**

- 1 Abra a tampa do compartimento da bateria.
- 2 Puxe a tira de proteção.

**Medição**

- 1 A balança começará a medição quando a pessoa pisar na plataforma.
- 2 Quando a palavra (kg) for exibida, a medição foi concluída.
- 3 A balança desliga-se automaticamente aproximadamente 5 segundos depois.

**Exibição de erros**

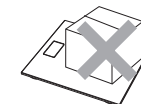
Sintoma	Causa	Solução
<b>E</b>	Movimento durante a medição.	Não se mexa até que a medição se complete.
<b>Err</b>	Desalinhamento durante a calibração automática.	Siga o procedimento de medição descrito em "Medição".
<b>Lo</b>	A bateria está se esgotando.	Troque a bateria.
<b>---</b>	O peso está fora do intervalo de medição.	Esta balança pesa de 5kg até 150kg.

**Manutenção e armazenamento**

Não limpe a balança com gasolina, solventes ou água quente. Limpe a balança com um pano macio embebido em um agente neutro de limpeza e seque com outro pano.



Se objetos forem deixados em cima da plataforma por um longo tempo, isto manterá a bateria ligada, descarregando as baterias.

**Informação Sobre Garantia**

A sua **balança digital HN-289**, excluindo as baterias, está garantida como livre de defeitos de material e de mão-de-obra que venham a surgir dentro de 1 ano a partir da data de compra, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra ou Cupom Fiscal, quando usada de acordo com as instruções fornecidas com a **balança digital HN-289**. A garantia é invalidada quando os defeitos/danos forem decorrentes de mau uso ou vazamento de baterias. A garantia acima se aplica apenas ao consumidor inicial, que adquire o produto no varejo.

O conserto ou a substituição do dispositivo coberto pela garantia descrita acima serão realizados sem custos, se assim for decidido pela Omron. O conserto ou a substituição é nossa responsabilidade e única solução prevista conforme a garantia acima.

**Se o seu dispositivo necessitar de assistência dentro do período de garantia, entre em contato com o SAC da Omron Healthcare Brasil.**

**ESTE DOCUMENTO É A ÚNICA GARANTIA FORNECIDA PELA OMRON EM CONJUNTO COM ESTE PRODUTO, E A OMRON SE DECLARA ISENTA DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO PARA FINS DETERMINADOS.**

**AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E OUTROS TERMOS QUE POSSAM SER IMPOSTOS POR LEI, SE HOUVER, SÃO LIMITADOS AO TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA EXPRESSO ACIMA.**

**A OMRON NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA PERDA DE USO OU QUALQUER OUTRO CUSTO, DESPESA OU DANOS CASUAIS, DECORRENTES, INDIRETOS OU ESPECIAIS.**

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos; você pode também ter outros direitos que variam de acordo com a jurisdição. Devido aos requisitos especiais locais, algumas das limitações e exclusões acima podem não ser aplicáveis ao seu caso.

**Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-771-6907**

www.omronbrasil.com

sac@omronbrasil.com

**Especificações**

Modelo	Balança digital HN-289 da OMRON
Faixa de medição	5 a 150 kg
Unidade mínima exibida	0.1 kg
Alimentação	1 bateria de lítio de 3 V (tipo CR2032)
Temperatura/umidade de operação	+5 a +35°C, 30 a 85% RH
Condições de armazenamento	-20 a +60 °C / 10 a 95 % RH
Vida útil da bateria	Aproximadamente 1 ano (com 4 medições por dia)
Dimensões	Aproximadamente 290 (L) x 270 (A) x 22 (P) mm
Peso	Aproximadamente 1,2 kg (incluindo a bateria)
Conteúdo	1 Balança digital, 1 bateria de lítio de 3V (CR2032), 1 manual de instruções

As especificações estão sujeitas a alterações.

**Distribuído por:**  
OMRON HEALTHCARE, INC.  
Illinois, U.S.A.  
www.omronhealthcare.jp

**Fabricado por:**  
Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd.  
No. 28, Xing Yang Road, Economic  
Development Zone, Yangzhou, Jiangsu,  
225009, China

**Fabricante legal:**  
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.  
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko,  
Kyoto, 617-0002 JAPAN

**Importado e distribuído no Brasil por:**  
Omron Healthcare Brasil  
Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda.  
CNPJ: 10.345.462/0008-70  
Av Ain Ata (Lot M II P I Logístico), 370  
Lote 12 - Quadra B - Jardim Ermida I  
Jundiaí/SP - CEP: 13.212-213  
SAC da OMRON Healthcare Brasil  
Grande São Paulo e telefones móveis: (11) 2336-8044  
Demais regiões brasileiras:  
0800 771 6907  
sac@omronbrasil.com  
www.omronbrasil.com