

INSTRUÇÕES DE USO

DATA: 07/02/2023

REVISÃO: 01

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME COMERCIAL: ESPÉCULO VAGINAL VAGISPEC DESCARTÁVEL

Nº DO PROCESSO: 25351.411358/2006-17

Nº NOTIFICAÇÃO ANVISA: 10237610059

2. USUÁRIO

Para uso do profissional da saúde habilitado.

3. INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a embalagem do produto 2. Retirar o espécuro da embalagem através da articulação 3. Introduzir o espécuro no canal vaginal conforme técnica de domínio do profissional 4. Girar o parafuso para que as valvas sejam afastadas e assim proporcionem o afastamento das paredes do canal vaginal, até a medida necessária 5. Retornar o parafuso a posição original antes da retirada do espécuro.