

FERNANDO UNIFORMES EIRELI | CNPJ: 21.008.058/0001-51

R. João do Pulo, 116-A e B, Pq. Industrial I | CEP: 86.975-000 | Mandaguari - PR - Brasil

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO

50 unidades - Cores Azul / Branca / Pink / Preta / Rosa.

ANVISA: 82053500004 - AFE: 8205350

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Lote/Validade: Vide embalagem.

Responsável técnico: Simone Sevidani Rodrigues CREA-PR PR-209619/D

A Máscara Cirúrgica Descartável Tripla Camada com Elástico tem a finalidade de proteger os usuários das áreas médico-hospitalar, odontológica, alimentícia, farmacêutica, laboratorial, clínicas de estéticas ou população em geral de materiais biológicos infectantes em situações de potencial contaminação. Adicionalmente, as máscaras servem de barreira física à propagação de microorganismos da cavidade oral do usuário para o ar ambiente, reduzindo a contaminação bacteriana no ambiente. **Produto descartável. Reprocessamento proibido. Não estéril. Uso único. Não reutilizar.**

Composição têxtil: 100% Não-tecido de polipropileno, tripla camada, EFP (Eficiência de Filtragem de Partículas) $\geq 98\%$, EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) $\geq 99\%$, com elástico roliço e clipe nasal. Atóxica, não inflamável, isenta de fibra de vidro.

Modo de uso: 1. Verificar se a embalagem não foi violada, em caso positivo, descartar o produto; 2. Retirar a máscara da embalagem (atenção para não tocar na superfície interna da máscara); 3. Os elásticos devem se fixar nas orelhas do usuário; 4. Deve-se puxar para baixo o corpo da máscara com as duas mãos e fixá-la na face de forma que cubra a boca e as narinas; 5. Ajustar o clipe nasal para que se ajuste à face; 6. Após utilização, descartar a máscara em local adequado, conforme orientação do estabelecimento.

Durante o transporte, evitar a exposição direta a luz, calor e umidade, armazenar em local limpo, seco, arejado e em temperatura ambiente. O produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver violada ou com a validade expirada. Após o uso, a máscara deve ser descartada em local apropriado.

SAC: sac@sprotection.com.br - www.sprotection.com.br - 44 3233-0050.

© 2024 SP< Institucional. Todos os direitos reservados.

