



IODONTOSUL
PRODUCTS FOR HEALTH



FICHA TÉCNICA

ÓLEO DE LARANJA

www.iodontosul.com.br

ÍNDICE

1. PRODUTO	3
2. APRESENTAÇÃO	3
3. REGISTRO M. S.	3
4. NCM	3
5. VALIDADE	3
6. COMPOSIÇÃO	3
7. INDICAÇÃO	3
8. MODO DE USO	4
9. RESTRIÇÕES DE USO	4
10. RECOMENDAÇÕES	4
11. ARMAZENAMENTO	4
12. FABRICADO POR	4

1. PRODUTO

Óleo de Laranja

2. APRESENTAÇÃO

Embalagem primária: Frasco completo contendo 10mL do produto (Frasco vidro âmbar, gotejador e tampa em PEAD - Polietileno de Alta Densidade, na cor branca).

Embalagem Secundária: Cartuchos de cartão triplex impresso, contendo o frasco completo do produto.

3. REGISTRO M.S.

80442029013

Risco: Classe II – Médio Risco

4. NCM

29021910

CÓDIGO EAN

7898698760404

5. VALIDADE

24 meses

6. COMPOSIÇÃO

- Óleo de Laranja

7. INDICAÇÃO

O produto é indicado na utilização como solvente de Gutta-Percha.

8. MODO DE USO

1. Iniciar o processo da remoção da restauração pelo método mecânico.
2. Aplicar 1-2 gotas do Óleo de Laranja sobre o canal radicular e deixar agir por 5-10 minutos.
3. Introduzir os instrumentos até o forame apical e remover todo o material obturador do interior do canal.
4. Após a completa remoção, utilizar uma solução tensoativa para promover uma limpeza eficaz.

9. RESTRIÇÕES DE USO

É contra-indicado em pessoas com sensibilidade ao óleo de laranja.

10. RECOMENDAÇÕES

Evitar contato com olhos, mucosas e pele. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Uso exclusivo do cirurgião dentista. Não utilizar com prazo de validade vencido.

11. ARMAZENAMENTO

Local seco e protegido da luz, de 15°C a 30°C

12. FABRICADO POR

Souza & Leonardi LTDA (07.707.681/0001-71)
Rua Vítor Valpírio, 343 - bairro Anchieta, Porto Alegre/RS - Brasil
CEP: 90.200-230 Telefone (51) 3374-2978
iodontosul@iodontosul.com.br
A.F.E. N° 8.04.420-2