



IODONTOSUL
PRODUCTS FOR HEALTH



FICHA TÉCNICA

TARTARIT

www.iodontosul.com.br

ÍNDICE

1. PRODUTO	3
2. APRESENTAÇÃO	3
3. REGISTRO M. S.	3
4. NCM	3
5. VALIDADE	3
6. COMPOSIÇÃO	3
7. INDICAÇÃO	4
8. MODO DE USO	4
9. RESTRIÇÕES DE USO	4
10. RECOMENDAÇÕES	4
11. ARMAZENAMENTO	4
12. FABRICADO POR	4

1. PRODUTO

Tartarit

2. APRESENTAÇÃO

Embalagem primária:

rasco plástico de polietileno contendo o produto (30mL); Tampa em material plástico.

Embalagem secundária:

Cartuchos de cartão triplex impresso, contendo um frasco do produto.

3. REGISTRO M. S.

80442020055

RISCO I - Baixo Risco.

4. NCM

33069000

CÓDIGO EAN:

7898936468994

5. VALIDADE

24 meses.

6. COMPOSIÇÃO

- Ácido fosfórico;
- Álcool Etílico;
- Glicerina;
- Fluoreto de sódio;
- Timol;
- Corante Vermelho;
- Corante Amarelo;
- Água deionizada.

7. INDICAÇÃO

O produto é indicado para a remoção de manchas e tártaro dentário, que são placas mineralizadas, ocasionadas principalmente por falta de higienização e prevenção.

8. MODO DE USO

- Realizar a limpeza mecânica da superfície dental;
- Em seguida realizar uma abrasão na superfície do dente;
- Aplicar o Tartarit sobre a superfície na qual a mancha ou placa está presente, utilizando um microaplicador e aguardar de 1 a 2 minutos;
- Lavar a área em seguida aplicar uma pasta profilática;
- Lavar novamente a área e secar.

9. RESTRIÇÕES DE USO

É contra-indicado em pessoas com sensibilidade a algum componente da formulação.

10. RECOMENDAÇÕES

Evitar contato com olhos, mucosas e pele. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir, caso ocorra procure ajuda médica. Uso exclusivo do cirurgião dentista. Não utilizar com prazo de validade vencido.

11. ARMAZENAMENTO

Local seco e protegido da luz, de 15°C a 30°C

12. FABRICADO POR

Souza & Leonardi LTDA (07.707.681/0001-71)
Rua Vítor Valpírio, 343 – bairro Anchieta, Porto Alegre/RS – Brasil
CEP: 90.200-230 Telefone (51) 3374-2978
iodontosul@iodontosul.com.br
A.F.E. N° 8.04.420-2