

INDICAÇÃO: DEBRIGEL® PEC é um gel indicado no tratamento de todos os tipos de feridas para manter a hidratação do leito, realizar desbridamento quando necessário e auxiliar na cicatrização das feridas.

MODO DE USO: Produto de uso TÓPICO.

- Calce luvas de procedimento e descarte-as ao término do curativo.
- Se necessário, umedeça o curativo antes de removê-lo.
- Remova o curativo e realize a limpeza da ferida conforme protocolo da instituição. Não friccione a lesão e evite força mecânica.
- Seque as bordas com uma gaze limpa.
- Aplique **DEBRIGEL® PEC** diretamente dentro da ferida, não exceder a borda da ferida.
- Oclua a ferida com o curativo secundário da sua escolha.
- Troque o curativo a cada 24 horas ou sempre que o curativo estiver saturado.

CONTRAINDICAÇÕES: Em caso de hipersensibilidade, não utilize ou interrompa o uso e procure orientação médica.

REAÇÕES ADVERSAS: Não são conhecidos efeitos colaterais ou reações adversas.

COMPOSIÇÃO: Água, Carbômero, Carboximetilcelulose, Imidazolidinilureia, Metilparabeno, Pectina, Propilenoglicol e Propilparabeno.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Produto de uso TÓPICO. Não utilize para perfusão ou injeção. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Se houver suspeita de infecção ou se esta se desenvolver durante o uso de **DEBRIGEL® PEC**, deve-se instituir terapêutica antibiótica adequada, podendo continuar a utilização do produto, porém a monitoração do processo de cicatrização da ferida deverá estar sob supervisão médica. Não use produto com o prazo de validade vencido ou embalagem violada. As bisnagas que tenham tocado na ferida devem ser descartadas após a utilização. Não exceda o nível da pele ao redor da ferida a fim de não macerar as bordas.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: DEBRIGEL® PEC deve ser mantido à temperatura ambiente (15-30°C), mantido na embalagem original e bem fechado. Não tocar a embalagem na ferida. O produto possui sistema conservante que o mantém em condições de uso mesmo após aberto.

VALIDADE: Seguindo os cuidados de conservação citados anteriormente, o produto será válido durante o prazo estipulado na embalagem.

DETENTOR E FABRICANTE:

HELIANTO FARMACÊUTICA Ltda
CNPJ: 04.506.487/0001-30 - Indústria Brasileira
Av. José Abbas Casseb, 135 - São José do Rio Preto/SP
SAC: (17) 3302-1600
E-mail: sac@heliantofarmaceutica.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Maryster F. Picolin. CRF-SP 27.877
ANVISA nº: 80225200006

LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE: Vide marcação.