



Guía de compresión médica

Numerosos estudios médicos en todo el mundo han demostrado que la terapia de compresión es el elemento más importante en el tratamiento exitoso de las enfermedades venosas.

Propósito de las medias de compresión Venosan

Las medias de compresión médicas Venosan proporcionan una ayuda eficaz para aliviar el cansancio, la sensación de pesadez en las piernas y aliviar los síntomas de las enfermedades venosas. La compresión es mayor en el tobillo y disminuye gradualmente hacia la rodilla hasta el muslo, esto ayuda en el retorno de la circulación sanguínea al corazón.

Indicaciones

15-23 y 18-22 mmHg

- Edema leve
- Piernas cansadas
- Trabajo de pie
- El embarazo
- Cirugía venosa
- Viajes

18 mmHg (AES)

- Inmovilidad general
- Periodos prolongados en camas
- Antes, durante y después del parto
- Previene embolias (antes, durante y después de la cirugía)

20-30 mmHg

- Edema discreto
- Varicosidad leve
- Prevención de las varices durante el embarazo

30-40 mmHg

- Varices propensas al edema
- Insuficiencia venosa crónica
- Post escleroterapia
- Cirugía de varices

Riesgos y precauciones

Las personas que padecen las siguientes enfermedades no deben utilizar las medias de compresión médicas Venosan.

Contra indicaciones

- Disfunciones graves de la circulación arterial
- Microangiopatías agudas
- Neuropatías agudas
- Pacientes postrados en cama (excepto por compresión leve)

Solo con consejo médico

- Edema agudo
- Dermatitis húmeda
- Insuficiencia cardíaca descompensada
- Después de una trombosis profunda reciente

En caso de duda, busque atención médica. Suspenda el uso del calcetín en caso de irritación de la piel.

Declinamos cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de estas contraindicaciones.

Cómo utilizar

Utilizar se de guantes de latex (de uso en casa) para ponerse las medias.

1. Utilizar un calizador para mejor ponerse las medias. El calizador viene junto con su media de compresión Venosan (en compresiones mas fuertes)
2. Coloque la mano en la media y tome el talón entre el pulgar y los dedos haciendo presión en el talón, voltear el producto de adentro hacia afuera, lo que lleva el talón hacia el frente.

3. Sustener el pie de la media con los pulgares, cada uno su lado, entonces meta el pie y coloque el talón de la media justo antes del talón.

4. Desdoble con cuidado la prenda con movimientos despacitos hacia adelante y para detras. Pongase la media en la pierna.

5. Instrucciones de posicionamiento:

AD - Por debajo de la rodilla: coloque la banda aproximadamente 4 cm por debajo de la flexión de la rodilla. No baje la banda

AGH - Pantimedias con silicona: coloque la banda en la mitad del muslo

AGG - Pantimedias con correa: Coloque la banda aproximadamente 4 cm por debajo del área de la ingle

AT / ATQ - Pantimedias: coloque la banda del pantalón alrededor de su cintura

6. Los calcetines deben colocarse uniformemente sobre la pierna. Alise la tela hacia el tobillo hasta que desaparezcan todas las arrugas. **IMPORTANTE:** no estires demasiado el calcetín. Este exceso puede acumularse detrás de la rodilla y causar molestias. Distribuya el calcetín uniformemente sobre la pierna.

Quitarse el calcetín

1. Sostenga la parte superior del calcetín con cuidado y baje hasta el tobillo
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** NO permita que el calcetín se enrolle alrededor del tobillo
2. Inserte los pulgares entre él y la pierna y retirelo del tobillo
3. Retire el calcetín del pie, lentamente

Cuidados

Uñas afiladas, manos astilladas o muy largas, ásperas, relojes y anillos puntiagudos, zapatos de mala calidad, pies descalzos o lavado incorrecto, pueden dañar el delicado material de los calcetines Venosan®. Recomendamos el uso de guantes de goma para ponerse y quitarse los calcetines. Use siempre zapatos de buena calidad. Lávese a mano con un jabón suave. Envuelva en una toalla y retire el exceso de agua. Extiéndalo y déjelo secar. Nunca use lejías, suavizantes de telas o perfumes. Todos los quitamanchas (como trementina o gasolina), ungüentos, geles o polvos para pies pueden dañar el material Venosan®.

Instrucciones de cuidado especial para los calcetines VENOSAN® con cinta de silicona:

El uso de ciertos productos para el cuidado de la piel (como lociones corporales, cremas o polvos para la piel), el peeling de la piel seca o el uso en áreas con cabello puede hacer que la cinta de silicona se vuelva no adherente en el sitio.

Para mejorar el rendimiento de la cinta de silicona en las condiciones anteriores, recomendamos lo siguiente:

Instrucciones de lavado

1. Dar la vuelta a la pieza antes de lavarla
2. Lave a mano la cinta de silicona con un detergente suave para ropa. Concéntrese en eliminar cualquier loción, polvo, cabello u otro material extraño a la silicona
3. Ajuste la posición de la cinta de silicona varias veces al día. La silicona en contacto constante con la humedad de la piel puede irritar la piel sensible

Modo de conservación

- Mantener adentro
- Mantener dentro del embalaje
- Mantener seco sin exposición al sol

Validez

Indeterminado

Composición

- Ver caja de producto

Garantía de calidad total

Medias de compresión médicas VENOSAN®

- Están fabricados con materiales de alta calidad y se someten a inspección de calidad para evitar defectos
- Todas las medias de compresión VENOSAN® se prueban periódicamente
- Garantizamos el efecto compresivo de 6 meses a partir de la fecha de emisión de la factura
- ⚠ Para cambiar el producto, solicitamos información en la etiqueta o embalaje con la factura
- Visite nuestro sitio web: www.venosan.com.br para solicitar el procedimiento de canje

AES estéril:

- Garantizamos la esterilidad del producto siempre que no se rompa el embalaje

Modo de uso

Use luvas de borracha (luvas comuns de uso doméstico) ao calçar as meias.

1. Use o calçador para facilitar a colocação da meia. Ele vem junto da sua meia compressiva Venosan®

2. Vire a meia do avesso até o calcanhar. Com exceção do pé

3. Segure o pé da meia com os polegares, um de cada lado e calce em seu pé até o calcanhar

4. Desvirando aos poucos com um leve movimento para frente e para trás. calce a meia na perna

5. Instruções de posicionamento:

AD - Abaixo do joelho: posicione a faixa aproximadamente 4 cm abaixo da dobra do joelho. NÃO enrole a faixa para baixo

AGH - Meia-calça com silicone: posicione a faixa na metade da coxa

AGG - Meia-calça com cinta: Posicione a faixa aproximadamente 4 cm abaixo da área da virilha

AT/ATQ - Meia-calça: Posicione a faixa da calça na cintura

6. As meias devem ser colocadas de forma uniforme sobre a perna. Alise o tecido em direção ao seu tornozelo até que todas as rugas desapareçam. **IMPORTANTE:** não estique a meia demais. Esse excesso pode se acumular atrás do joelho causando desconforto. Distribua a meia pela perna de maneira uniforme

Remoção da meia

1. Segure a parte superior da meia com cuidado e desça até o tornozelo, ⚠ **CUIDADO:** NÃO deixe que a meia fique enrolada ao redor do tornozelo.

2. Insira os polegares entre ela e a perna e remova-a do tornozelo.

3. Retire a meia do pé, lentamente.

ACESSE O QR CODE DO
NOSSO CANAL
NO YOUTUBE PARA
OBTENHA MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE
O MODO DE USO



ACCEDE AL CÓDIGO QR
DENUESTRO CANALEN
YOUTUBE PARA OBTENER
MÁS INFORMACIONES
SOBRE CÓMO UTILIZAR



Guia de compressão médica

Inúmeros estudos médicos em todo o mundo comprovam que a terapia de compressão é o elemento mais importante no tratamento bem-sucedido das doenças venosas.

Objetivo das meias compressivas medicinais Venosan®

As meias compressivas medicinais Venosan® proporcionam auxílio efetivo no alívio do cansaço, sensação de peso nas pernas e no alívio dos sintomas das doenças venosas. A compressão é maior no tornozelo e vai diminuindo gradualmente em direção ao joelho até a coxa, isso ajuda no retorno da circulação sanguínea para o coração.

Indicações

15-23 e 18-22 mmHg

- Edema leve
- Pernas cansadas
- Trabalhos em pé
- Gravidez
- Cirurgia venosa
- Viagens

18 mmHg (AES)

- Imobilidade geral
- Períodos prolongados em leitos
- Antes, durante e após o parto
- Previne embolias (antes, durante e após cirurgias)

20-30 mmHg

- Edema discreto
- Varicosidade leve
- Prevenção de varicosidade durante a gravidez

30-40 mmHg

- Varizes com tendência a edema
- Insuficiência venosa crônica
- Pós-escleroterapia
- Cirurgia de varizes

Riscos e precauções

As meias medicinais de compressão Venosan® não devem ser usadas por pessoas que sofram das doenças a seguir.

Contraindicações

- Disfunções graves da circulação arterial
- Microangiopatias agudas
- Neuropatias agudas
- Pacientes acamados (exceto para suave compressão)

Somente com orientação médica

- Edema agudo
- Dermatite úmida
- Insuficiência cardíaca descompensada
- Após trombose profunda recente

Em caso de dúvidas, procure um médico. Suspender o uso da meia em caso de irritação na pele.

Isentamo-nos de qualquer responsabilidade em caso da não observância dessas contraindicações.

Cuidados

Unhas afiadas, lascadas ou muito compridas, mãos ásperas, relógios e anéis pontiagudos, sapatos de má qualidade, pés descalços ou lavagem incorreta, podem danificar o material delicado das meias Venosan®. Recomendamos o uso de luvas de borracha para calçar e descalçar as meias. Sempre calce sapatos de boa qualidade. Lave à mão usando sabão neutro. Enrole em uma toalha e remova o excesso de água. Estenda e deixe secar. Nunca use alvejantes, amaciantes de roupa ou perfumes. Todos os removedores de manchas (como terebentina ou gasolina), unguentos, géis ou talcos para pés podem danificar o material Venosan®.

Instruções de cuidado especial para a meia VENOSAN® com fita de silicone:

O uso de certos produtos para o cuidado da pele (tais como loções para o corpo, cremes para a pele ou pó), a descamação de pele seca ou o uso em áreas com pelos, pode ocasionar falta de aderência da fita de silicone no local.

Para melhorar a performance da fita de silicone sob as condições acima, nós recomendamos o seguinte:

Instruções de lavagem

1. Vire a peça pelo avesso antes de lavar
2. Lave à mão a fita de silicone usando um detergente delicado para roupa. Concentre-se em remover qualquer loção, pó, cabelo ou outro material estranho ao silicone
3. Ajustar a posição da fita de silicone várias vezes ao dia. O silicone em contato constante com a umidade da pele pode provocar irritação em peles sensíveis

Modo de Conservação

- Manter em ambiente fechado
- Manter dentro da embalagem
- Manter seca sem exposição ao sol

Validade

- Indeterminada

Composição

- Vide a caixa do produto

Garantia de qualidade total

As meias medicinais de compressão VENOSAN®

- São confeccionadas com materiais de alta qualidade e passam por inspeção de qualidade para evitar defeitos
- Todas as meias de compressão da VENOSAN® são testadas regularmente
- Garantimos o efeito compressivo de 6 meses a partir da data de emissão da nota fiscal
- ⚠ Para realizar a troca do produto, solicitamos informações da etiqueta ou embalagem com a nota fiscal
- Consulte nosso site: www.venosan.com.br para consultar o procedimento de troca

AES Estéril:

- Garantimos a esterilidade do produto enquanto a embalagem não estiver violada



“Mais saúde e beleza para suas pernas.”
“Mas salud y belleza para sus piernas.”

Instruções de uso

Instrucciones para el uso

Meias e meias-calças compressivas medicinais

Medias y panties de compresión medicinais



Lavar somente à mão.
Temperatura máx. 40°C



Não usar alvejante



Não secar em tambor



Secagem na horizontal à sombra



Não passar a ferro



Não lavar a seco

Fabricado por:
VENOSAN® BRASIL LTDA
Av. Governador Nilo Coelho, 360
Distrito Industrial
Abreu e Lima - PE - Brasil - CEP: 53.520-810

🌐 www.venosan.com.br
📧 @venosanbrasil
🌐 www.linkedin.com/company/venosanbrasil
🏢 Venosan Brasil
✉ sac@venosan.com.br
☎ +55 81 3538-8929

A Venosan® Brasil LTDA é uma empresa do grupo .
A Venosan® é marca registrada da SWISSLASTIC AG, St.Gallen, Switzerland, uma empresa do grupo .