

DADOS TÉCNICOS

- Agulha confeccionada em aço inoxidável;
- Tubo flexível composto de Etileno Propileno Fluorado (FEP) radiopaco;
- Estéril;
- Resistente à torção;
- Bisel trifacetado;
- Lubrificado, facilitando uma punção suave;
- Possui filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas;
- Conector compatível com conexões luer lock e luer slip;
- Embalado individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico;
- O Cateter Periférico Intravenoso Descartável Descarpack é indicado para terapia intravenosa periférica, de curta duração de tempo.

MODELOS DISPONÍVEIS

Tamanho

14G

16G

18G

20G

22G

24G

MODELOS CADASTRADOS

Tamanho

14G

16G

17G

18G

20G

22G

24G

26G

INSTRUÇÕES DE USO

1. Selecione o calibre desejado de acordo com o paciente e as condições de punção;
2. Lavar as mãos antes e após o procedimento;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Garrotear o local;
5. Fazer a antisepsia do local a ser puncionado;
6. Remova a tampa com um movimento de rotação;
7. Mantenha o bisel do mandril virado para cima, confirme a posição checando a marca de posicionamento;
8. Faça a punção e observe se a agulha foi posicionada observando o retorno de sangue através do mandril;
9. Segure o mandril e avance o cateter na profundidade desejada;
10. Segure o cateter firmemente, retire o mandril e só então conecte o cateter a um equipo de infusão ou de transfusão;
11. Proteja o local de punção com uma gaze estéril, que servirá também de proteção para a conexão do equipo;
12. Soltar o garrote;
13. Fixar o cateter com fita própria;

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Fabricado em Etileno Propileno Fluorado (FEP);
- Com recurso flashback, que permite a visualização do sangue no exato momento da punção;
- Não tente reinserir uma agulha retirada parcial ou totalmente. Se a punção foi mal sucedida, descarte o cateter e troque por um novo. A reinserção da agulha pode danificar o cateter;
- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar o produto caso este esteja fora da data de validade;

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada;
- Produto esterilizado com óxido de etileno;
- Proibido reprocessar;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Descarte o material em local apropriado, seguindo o PGRSS da instituição.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente próprio para perfurocortantes (grupo E de acordo com a RDC 222/2018).

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante Responsável: Poly Medicure Limited

Importado e Distribuído por: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

Notificação Anvisa: 10330660066

Responsável Técnica: Beatriz Poleza – CRQ: 13101190