

Instruções de Uso

3M

Cavilon

Película Protetora sem Ardor

Descrição do Produto 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor é uma solução polimérica que forma uma película uniforme quando aplicado na pele. O produto está diluído em um solvente não citotóxico, que não provoca ardor e que seca rapidamente. 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor ajuda a proteger a pele intacta ou a pele lesionada devido à ação irritante de fluidos oriundos de incontinência urinária e/ou fecal, sucos digestivos, efluentes, exsudato de feridas, adesivos, fricção. A película formada é incolor, transparente e fornece boa permeabilidade ao oxigênio e ao vapor. 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor não contém álcool, podendo ser aplicado em peles hiperemiadas e/ou lesionadas.

Composição Hexametildisiloxano, isoctano, copolímero (terpolímero) acrílico e polifenilmetilsiloxano.

Indicação de Uso 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor é um líquido que se destina a ser usado como formador de película, para que quando aplicado à pele intacta ou à pele lesionada, forma uma barreira protetora resistente de longa duração* que atua como protetor entre a pele e os fluídos corporais, efluentes, produtos adesivos e fricção. É indicado como uma barreira primária contra irritação de fluidos corporais. Indicado para uso em adultos, crianças e bebês acima de um mês de vida.

*vide item: Instruções Gerais de Uso item nº: 6.

Contra-Indicações 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor não deve ser usado: 1. Como a única cobertura em situações que requeiram curativos que evitem contaminação/penetração de microorganismos, como por exemplo em locais de inserção de cateteres intravenosos ou em áreas com perda parcial ou total de tecidos ou mucosas. 2. Em áreas infectadas da pele.

Advertência

1. PERIGO! Líquido e vapores altamente inflamáveis.
2. Cavilon™ Película Protetora sem Ardor contém hexametildisiloxano que é considerado extremamente inflamável.
3. Cavilon™ Película Protetora sem Ardor é extremamente inflamável até secar completamente na pele e vapores tenham sido dissipados. PERMITA QUE O PRODUTO SEQUE POR NO MÍNIMO 90 SEGUNDOS ANTES UTILIZAR QUALQUER DISPOSITIVO QUE POSSA FORNECER UMA FONTE DE CALOR OU IGNIÇÃO. ISTO PERMITE QUE O SOLVENTE SEQUE E OS VAPORES DISSIPEM.
4. Não use Cavilon™ Película Protetora sem Ardor perto de fogo ou chama, calor, faíscas e fontes de descarga estática.

5. Não utilize o Cavilon™ Película Protetora sem Ardor perto de fontes de ignição ou dispositivos que produzam calor. Use em área bem ventilada.

6. Os aplicadores de espuma e lenços são embalados individualmente e de uso único. O reuso pode resultar em aumento do risco de infecção ou performance inadequada do produto. O frasco de spray destina-se ao uso em um único paciente.

7. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Precauções Na ocorrência de alguma reação e/ou alteração na pele, descontinue o uso e observe. Caso persista algum sinal/sintoma, consulte um profissional de saúde. Nos casos em que haja o acompanhamento de um profissional de saúde, siga a orientação previamente fornecida. Evite contato com os olhos. O uso de outros produtos de proteção, ungüentos, cremes ou loções podem reduzir significativamente a eficácia do produto.

Instruções de uso em ambiente cirúrgico:

Consulte a seção Advertências sobre esta informação.

O uso de Cavilon™ Película Protetra sem Ardor quando usado em ambiente cirúrgico deve ser avaliado e verificado o tempo de secagem do produto, conforme recomendado abaixo, devido “ao risco de incêndio” em sala cirúrgica.

1. A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do Cavilon™.

2. Usando o Cavilon™ na apresentação lenço e ou swab, aplique uma camada uniforme de filme sobre toda a área desejada. O spray não deve ser usado em um ambiente cirúrgico.

3. Se uma determinada área ficar sem aplicação, espere o produto secar completamente para depois aplicá-lo no local desejado.

4. PERMITA QUE O PRODUTO SEQUE POR NO MÍNIMO 90 SEGUNDOS ANTES UTILIZAR QUALQUER DISPOSITIVO QUE POSSA FORNECER UMA FONTE DE CALOR OU IGNIÇÃO. ISTO PERMITE QUE O SOLVENTE SEQUE E OS VAPORES DISSIPEM.

5. Se o 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor for aplicado em áreas de dobras, mantenha as partes separadas. Aplique o produto, espere sua secagem completa e depois deixe que a pele retorne a sua posição normal.

6. Quando usar sob fitas adesivas, curativos ou outros dispositivos:

(a) Deixe o 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor secar completamente antes de aplicar os curativos ou produtos adesivos;

(b) É necessário repetir a aplicação do 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor sempre que remover os curativos e/ou produtos adesivos pois a película de proteção é removida pelo adesivo.

Instruções de uso em áreas Pericateteres em terapia infusional:

1. Antes da aplicação do Cavilon™ Película Protetora sem Ardor , prepare o local desejado de acordo com o protocolo da instituição. É necessário que todas as preparações antissépticas sequem completamente.

2. Use o Protetor Cutâneo Cavilon™ na apresentação espuma (swab)/ lenço para aplicar uma camada uniforme de película na pele que será coberto pelo curativo e / ou dispositivo. Se

estiver usando um curativo contendo Gluconato de Clorexidina (CHG), não aplique a película na pele que entrará em contato com o gel de CHG. A apresentação em spray não é recomendada para aplicação no sítio de inserção de cateteres de terapia infusional.

3. Se uma determinada área ficar sem aplicação, espere o produto secar completamente (30 segundos aproximadamente) para depois aplicá-lo no local desejado.

4. Permita que o Cavilon™ seque completamente antes de cobrir com um curativo adesivo e / ou dispositivo.

5. É necessário repetir a aplicação do 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor sempre que remover os curativos e/ou produtos adesivos, pois a película de proteção é removida.

Instruções Gerais de Uso

1. A pele deverá estar limpa e seca antes de se aplicar o 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor.

2. Mantenha o bocal do pulverizador a uma distância de 10 a 15 cm da pele e aplique uma camada uniforme de película sobre toda a área.

3. Se uma determinada área ficar sem aplicação, espere o produto secar completamente (30 segundos aproximadamente) para depois aplicá-lo no local desejado. Em situações onde é esperado exposição da pele a irritantes causticos pode-se aplicar uma segunda camada de película protetora sobre a área afetada, após a primeira camada secar completamente.

4. Se o 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor for aplicado em áreas de dobras, mantenha as partes separadas. Aplique o produto, espere sua secagem completa e depois deixe que a pele retorne a sua posição normal.

5. Quando usar sob fitas, curativos ou outros dispositivos adesivos: (a) Deixe o 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor secar completamente antes de aplicar os curativos ou produtos adesivos; (b) É necessário repetir a aplicação do 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor sempre que remover os curativos e/ou produtos adesivos pois a película de proteção é removida.


6. Quando usado como proteção contra fluidos corporais, fezes, urina, etc., (exceto em uso de adesivos – vide item 5):

(a) É aconselhável repetir a aplicação do Protetor Cutâneo a cada 24-72 horas, dependendo da frequência de limpeza.

(b) Em casos extremos (por exemplo, diarreias) em que se tenha de fazer limpezas repetidas vezes, podem ser necessárias aplicações mais frequentes (por exemplo, a cada 12-24 horas).

7. Se desejado, a película poderá ser removida com removedores de adesivos de uso hospitalar, de acordo com as respectivas instruções. Limpe e seque a área e volte a aplicar o 3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor.

8. Coloque a tampa no bocal do pulverizador sempre que não estiver utilizando o produto, a fim de evitar qualquer descarga acidental do mesmo.

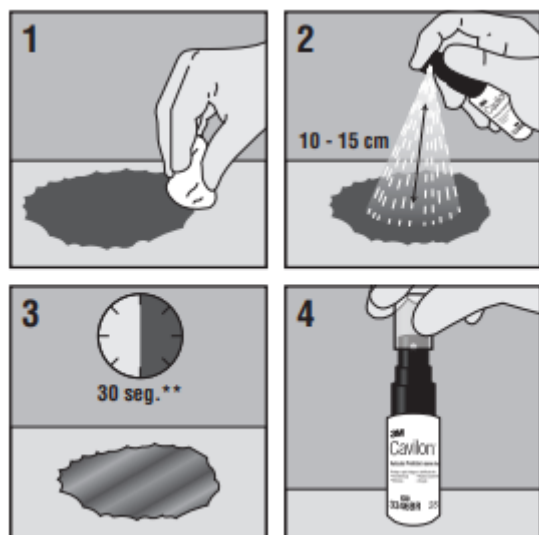

****PERMITA QUE O PRODUTO SEQUE POR NO MÍNIMO 90 SEGUNDOS ANTES UTILIZAR QUALQUER DISPOSITIVO QUE POSSA FORNECER UMA FONTE DE CALOR OU IGNIÇÃO. ISTO PERMITE QUE O SOLVENTE SEQUE E OS VAPORES DISSIPEM.**

Armazenagem e Prazo de Validade: Manter em temperatura ambiente (15-30°C). O lote e vencimento encontram-se impresso no produto.

Não é fabricado com látex de borracha natural.

Comunicado: Relate qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo a 3M bem como a autoridade competente local.

Notificação ANVISA 80284930340

Fale com a 3M - 0800-0132333 - falecoma3M@mmm.com - www.3M.com.br

País de Origem: Estados Unidos ou Brasil

Fabricantes:

- 3M Company

3M Health Care

. St Paul, MN 55144 USA

- 3M do Brasil Ltda.

Rod. Anhanguera, km 110 - Sumaré - SP

Detentor: 3M do Brasil Ltda.

Rod. Anhanguera, km 110 - Sumaré - SP

CNPJ 45.985.371/0001-08 - Indústria Brasileira