

Coletor para Material Perfurocortante Descarpack



DADOS TÉCNICOS

- Confeccionado em papelão;
- Indicado para o descarte de materiais perfurocortantes;
- É composto de sacola plástica, que torna o coletor impermeável por dentro;
- Cinta e Fundo para revestimento interno em papelão rígido, e Bandeja em papelão ondulado, o que lhe confere maior segurança e resistência;
- Cor amarela;
- Alças para manuseio;
- Trava de segurança;
- O coletor de 1,5L conta com desconector de agulha.;
- Símbolo de resíduos infectantes;
- Sinalização de limite de enchimento;
- Cumpre as recomendações estabelecidas pela RDC 222/2018 e CONAMA 358;
- O Coletor para Material Perfurocortante Descarpack é indicado para o descarte adequado a resíduos perfurocortantes, evitando acidentes e contaminações.

MODELOS DISPONÍVEIS

Tamanho

1,5 L

3,0 L


7,0 L

13,0 L

20,0 L

INSTRUÇÕES DE USO

1. Tirar o coletor da sacola e abrir conforme a figura;
2. Abrir o plástico, colocar o fundo rígido dentro do saco plástico e introduzir a cinta interna posicionando-a em forma de triângulo sobre o fundo rígido;
3. Colocar a sacola plástica já com o fundo rígido e a cinta dentro do coletor, encostar a cinta nas paredes internas. Colocar as sobras do saco plástico dentro do coletor;
4. Introduzir a bandeja impermeável sobre o saco plástico até o fundo;
5. Completar a montagem com o fechamento da tampa do bocal;
6. Pronto! Seu coletor está pronto para o uso;
7. Para descartar fechar a tampa externa;
8. Fechar a trava de segurança;
9. O coletor está pronto para ser descartado.

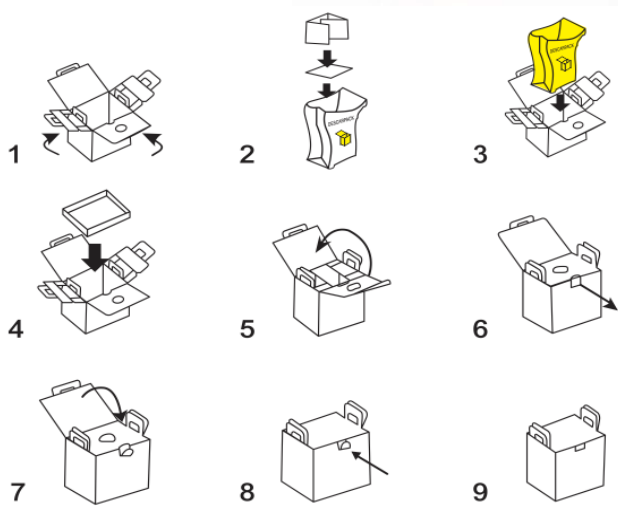

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada;
- Produto não estéril;
- Proibido reprocessar;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Manuseie exclusivamente pelas alças;
- Deve ser utilizado exclusivamente para descarte de resíduos sólidos;

- Após o enchimento descartar em local apropriado.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após atingir o limite de enchimento.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante Responsável: Descarpack Descartáveis do Brasil LTDA.

Importado e Distribuído por: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

Notificação Anvisa: 81187220001

Responsável Técnica: Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269