

Cadastro / Registro M.S.:

10369460183

Modelos Cadastrados:

Sem modelo cadastrado.

Indicação de Uso:

O esfigmomanômetro juntamente com o estetoscópio tem como função medir a pressão arterial. Sua utilização está indicada em qualquer exame físico médico.

Instrução de Uso:**• Sugestões prévias para medir a pressão sanguínea:**

- Evite comer, fumar e se exercitar pelo menos 30 minutos antes de fazer a medida.
- Descanse durante 15 minutos antes de efetuar a primeira leitura.
- Evite efetuar medidas durante momentos de estresse, pois a pressão sanguínea é mais elevada nesses momentos.
- Remova roupas justas ou apertadas da parte superior do braço esquerdo.
- As medidas devem ser tomadas em um local quieto e deve-se estar relaxado, em posição sentada. Descanse o braço esquerdo sobre uma mesa para que a manga da insuflação fique no mesmo nível do coração.
- Permaneça imóvel e não fale durante a medida.
- Mantenha o registro da pressão sanguínea e pulso medido e leve periodicamente ao seu médico. Lembre-se que uma simples medida não determinará a verdadeira pressão sanguínea. Precisa-se efetuar e gravar várias medidas em um período de tempo. Tente medir a pressão sanguínea na mesma hora todos os dias para assegurar a consistência da medida. A pressão sanguínea varia consideravelmente ao longo do dia.

• Instrução para a medição de pressão arterial:

1. Posicione o manguito (manga de insuflação).
2. Localize a artéria braquial pressionando dois dedos, aproximadamente a uma polegada acima da dobra do cotovelo na parte interna do braço esquerdo. Determine o local que o pulso é mais forte.
3. O manguito deve estar posicionado corretamente ao ser removido da caixa. Caso contrário, passe o final da extremidade da manga através do anel de metal formando um círculo por onde será introduzido o braço do paciente. A parte macia do
4. Se o manguito estiver posicionado corretamente, o velcro estará do lado de fora do círculo formado e o anel não tocará a pele.
5. Coloque o braço esquerdo através do círculo do manguito. O botão do manguito deve estar aproximadamente ½ polegada acima do cotovelo. A aba da manga deve estar sobre a artéria braquial na parte interna do braço.
6. Aperte a manga para que a extremidade do topo e o fundo estejam uniformemente apertados ao redor do braço.
7. Quando a manga estiver corretamente posicionada, pressione o velcro firmemente contra o lado felpudo da manga.
8. Assegure-se que a manga esta encaixada confortavelmente ao redor do seu braço. A manga deve proporcionar um bom contato com a pele.
9. Sente-se em uma cadeira e mantenha o braço sobre uma mesa para que a manga de insuflação fique no mesmo nível do coração.
10. O braço deve ficar relaxado e com a palma na mão para cima.
11. Assegure que não existam dobras no tubo de ar.
12. inicie a insuflação do manguito pressionando rapidamente o bulbo de insuflação até alcançar aproximadamente mais que 40 mmHG que a leitura sistólica normal. Se a pressão sanguínea sistólica normal é desconhecida, insufle o manguito até
13. Pare de pressionar o bulbo de insuflação quando estiver alcançado seu nível correto de insuflação e permaneça imóvel. O manguito iniciará o esvaziamento automático.

Nota: Lembre-se de manter um registro das medidas de pressão sanguínea e pulso.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- Temperatura de armazenamento de 0 a 40°C.
- Não pise na embalagem.
- Não permita quedas sobre superfícies rígidas.

- Armazene o produto em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol e vapores químicos.
- A manutenção preventiva deste aparelho é muito simples, consistindo apenas da conservação (limpeza) e uma verificação visual.
- Limpe o aparelho com um pano umedecido em uma solução fraca de sabão, exceto o manômetro.
- Verificar periodicamente o estado das mangueiras de borracha, se as mesmas estiverem decompostas, levar na assistência técnica para proceder a troca das mesmas.

Advertência/Precaução:

- Este produto deve ser manuseado com cuidado. O mesmo não pode sofrer quedas e nem impacto bruto. Caso isso ocorra, o mesmo deve ser recalibrado pelo Inmetro ou órgão credenciado.
- Para o perfeito funcionamento e longa vida do esfigmomanômetro recomenda-se não expor o equipamento a temperaturas extremas, umidade e luz direta do sol. A melhor faixa de temperatura para operação do equipamento é entre +10 e + 40°C.
- A pressão de ar no manguito não deve ultrapassar 280 mmHg, caso contrário o mecanismo será danificado.
- Não dobre o manguito e o tubo firmemente.
- Não desmonte o monitor de pressão.
- Não submeta o monitor de pressão a impactos fortes ou deixe cair no chão.
- Não limpe o monitor de pressão com líquidos voláteis.
- A limpeza do monitor deverá ser feita somente com tecido suave e seco. Não use solventes ou demais limpadores à base de petróleo.
- Mantenha objetos cortantes longe da braçadeira.
- Este produto destina-se a ser usado apenas por adulto.

Validade:

Indeterminado.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067

Fabricante:

Honsun (Nantong) CO. LTD

N.8, Tangxing Rd Economic & Tech Develop Area 226009 - China

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525