

INSTRUÇÕES DE USO FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO CORTANTE

Orientações para o uso das instruções de uso GOLGRAN em formato não impresso:

(conforme IN nº4, de 15/07/2012)

1. As instruções de uso das famílias Golgran estão disponibilizadas em formato não impresso e podem ser consultadas a qualquer tempo através do site Golgran (www.golgran.com.br/instrucoes);
2. Para identificar a instrução de uso do produto adquirido, o usuário deve observar no rótulo o número do **Registro ANVISA e seu respectivo nome comercial**. Com essas informações será possível identificar a instrução de uso correspondente ao seu produto;
3. As instruções de uso disponibilizadas apresentam as informações da revisão do documento e de sua data de emissão. É fundamental que o usuário consulte o rótulo do produto e observe qual a revisão da instrução de uso é correspondente ao produto fornecido;
4. O formato impresso das instruções de uso poderá ser solicitado **sem custo adicional** (inclusive de envio) pelo telefone +55 (11) 4223-6696 ou pelo e-mail sac@golgran.com.br. Na solicitação, o usuário deve informar a revisão da instrução de uso apresentada no rótulo do produto adquirido.

1. Identificação do Fabricante

Fabricante: GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA

CNPJ: 51.753.374/0001-19

Endereço: Rua Senador Vergueiro, 433 – São Caetano do Sul – SP – CEP:

09521-320

Telefone: +55 (11) 4223-6696

Website: www.golgran.com.br

Responsável Técnico: Fernando S. Domingues | CREA 0682565777

2. Identificação do Produto

Produto (Nome Comercial): FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO CORTANTE

Registro ANVISA: 10401310111

Código: Verificar rotulagem

Descrição: Verificar rotulagem

Validade: 10 anos

Contém 1 unidade

3. Modelos Comerciais da Família:

PINÇA FRAENKEL 18,19CM; PINÇA GROSS 14CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETA 26CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/ CIMA 26CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/ BAIXO 26CM; PINÇA GUYON 16,22,24,26CM; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 9,10,11,12,14,18,21CM RETA E CURVA; PINÇA HARKEN 24CM; PINÇA HARRINGTON 29,5,30,5CM; PINÇA HARTMANN 8,8.5,9,12,13,14,16.5,20,28CM; PINÇA HARTMANN C/ SERRILHA P/ CORPO ESTRANHO 8.5,13,14,16,16.5,20CM; PINÇA HARTMANN C/ DENTE P/ CORPO ESTRANHO 8.5CM; PINÇA HARTMANN P/ CURATIVO AURICULAR 13,16,20CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS HALSTEAD-MOSQUITO 15CM; PINÇA HERRICK 23CM; PINÇA JANSEN 18CM; PINÇA JUDD ALLIS 15,19CM; PINÇA KELLY 14,16,18,20 E 22CM RETA E CURVA; PINÇA KERRISON 4X4,5X5,6X6; PINÇA KOCHER 14, 16,18,20,22,24 RETA E CURVA; PINÇA KOCHER – ATRAUMA 25 cm – RETA E CURVA; PINÇA KOCHER – ATRAUMA 28 cm – RETA E CURVA; PINÇA KOCHER INTESTINAL E

COPROSTASIA 25 CM; PINÇA LAHEY 19, 22CM; PINÇA LAMBOTTE 21,26,31CM – COM BOCA MÓVEL; PINÇA LANE 18,22,23, 33, 45CM; PINÇA LEKSELL –STILLE 24 CM; PINÇA LEKSELL EM ÂNGULO 24CM; PINÇA LEMPERT 19CM; PINÇA LEWIN 17,5CM; PINÇA LITTAUER 12, 18CM; PINÇA LOVELACE 20CM; PINÇA LOWMANN PEQUENA N° 12,15,17CM; PINÇA LOWMANN MÉDIA 18.5CM; PINÇA LOWMANN GRANDE 20CM; PINÇA LUER 12 E 16CM; PINÇA LUER 17 E 18,5CM RETA E CURVA; PINÇA LUER–STILLE 22,22,5 E 27CM; PINÇA MAIER 25CM; PINÇA MARGILL 12,14,15,20,25CM; PINÇA MAKWALDER 20CM; PINÇA MARQUARDT 20CM; PINÇA MARTEL 14CM; PINÇA MARTIN 19CM; PINÇA MATHIEU 11,14,17, 20,28CM; PINÇA MAYFIELD 17CM; PINÇA MAYO 11,14,17 E 23CM; PINÇA MAYO ROBSON RETA E CURVA; PINÇA MAYO–BLAKE 20CM; PINÇA MCKENZIE 15CM; PINÇA MENKEL OU KOUGAN 27CM; PINÇA MICHEL 12,12.5CM; PINÇA MILLIN 23CM; PINÇA MUSEUX 24CM – RETA E CURVA; PINÇA MIXTER 14,16,18,20,22,24CM; PINÇA MOSQUITO 9,10,12,14,16,18,20,21CM – RETA E CURVA; PINÇA MOYNIHAN 22,24CM; PINÇA NEGUS 19CM; PINÇA OLDBERG 25 CM; PINÇA PARA INSTRUMENTO 23 cm; PINÇA PARA OSSO; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) 24CM – CURVA,RETA E ANGULADA; PINÇA PALMER SERRILHADA; PINÇA PAYR 15,21,35CM; PINÇA PEAN 14,16,20,23,26CM; PINÇA PORTA ENXERTO PERFURADA; PINÇA PORTA ENXERTO LISA; PINÇA PORTA GRAMPO BREWER; PINÇA PORTA GRAMPO PALMER; PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA; PINÇA PORTA IMPLANTE; PINÇA POZZI 24,25CM; PINÇA P/ RAÍZ INFERIOR E SUPERIOR; PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM – 2,3,4,5MM; PINÇA RANDAL 23CM N° 1,2,3 E 4; PINÇA RANKIN; PINÇA REINOLD 18CM; PINÇA REMOÇÃO MATRÍZES SEGMENTADAS; PINÇA ROCHESTER PEAN 16,18,20,22,24,26CM RETA E CURVA; PINÇA ROTTGEM–RUSKIN 24CM; PINÇA ROWE 23 cm – DIREITA E ESQUERDA; PINÇA RUSKIN 10CM; PINÇA RUSKIN 19CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA SAROT 23CM, SEMB 23CM; PINÇA SATINSKY 15,20,24,26CM; PINÇA SATINSKY 22CM – ANGULADA E CURVA; PINÇA SATINSKY BABY SERR/CRUZ 15CM,; PINÇA SATINSKY SERR/CRUZADA 18,20,22,24,26CM; PINÇA SAUERBRUCH CORYLLOS 31CM; PINÇA SAWTELL SCHNIDT 19CM; PINÇA SCHOEDER RETA E CURVA 25CM 2X2 DENTES; PINÇA SCHNIDT 19CM – RETA E CURVA; PINÇA SEMB 20CM; PINÇA SEMB 23CM; PINÇA SCHMIDT 18,19CM – RETA E CURVA; PINÇA SCHUBERT 26CM; PINÇA SCHUMACHER 31CM; PINÇA SMITH 22 CM (SEPARADOR DE CAVIDADES); PINÇA SMITH BICO DE PATO; PINÇA SPENCER WILLS 13,25,18,20,23CM RETA E CURVA; PINÇA SPURLING 12,5 E

18CM; PINÇA STILLE 23CM; PINÇA STILLE LISTON 27CM – RETA E CURVA; PINÇA STILLE-RUSKIN 23CM; PINÇA STONE; PINÇA STRULLY 22CM; PINÇA TAKAHASHI RETA; PINÇA TAKAHASHI 19CM – BOCA RETA; PINÇA TAKAHASHI 20CM – BOCA PARA CIMA; PINÇA THOMAS ALLIS 20CM; PINÇA THOMAS GAYLOR 24CM; PINÇA TUBO 18CM; PINÇA VAN BUREN 23CM; PINÇA WALSHAN DIREITA, ESQUERDA, RETA 23CM; PINÇA WERTHEIN CULLEN 21.5,22CM; PINÇA WILLIAMS; PINÇA WINTER 27CM – Nº 1,2,3 –RETA E CURVA; PINÇA WITTNER 23CM; PINÇA WITZEL PARA RAIZ SUPERIOR E INFERIOR; PINÇA YEOMAN 28,35CM – BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 28,35CM – BOCA CHATA; PINÇA YONG 16CM; PINÇA YOUNG 16, 20CM; PINÇA ZAUFAL 17CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS BAIBRIDGER 15,18CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS BALLENGER 18CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS CRILE 14,16 E 18CM – RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS DANDY 14CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS FORERSTER 16,18,20,24,25CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS GAUSS 27CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS GREEN-ARMYTAGE 21CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS HALSTEAD-MOSQUITO 9,12,18,20,21CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS HARTMAN 9 E 15CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS KELLY 14,16,18,20,22 E 32CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS KOCHER 14, 15,16,18,20,22,24,25,26CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS KOCHER 1X2 DENTES 14,16,18CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS MIXTER 16,18,22,23,25,28CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS MIXTER-BABY 14,16CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PEAN 14,16CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PEET-MOSQUITO 9 E 12,5CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PENNINGTON 15,20CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS PRATT 15CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS RANKIN-CRILLE 16CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS RANKIN-KELLY 16CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS ROCHESTER-CARMALT 16,18,20CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS ROCHESTER-PEAN 14,16,18,20,22,24,26,30CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS RUMEL 23CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS SAENGER 27CM; PINÇAS HEMOSTÁTICAS SPENCERWELLS 12,5, 14,15,18,20CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS ULRICH 22,25CM RETA E CURVA; PINÇAS HEMOSTÁTICAS WINTER 1,2,3; PORTA AGULHA ADSON, 18CM; PORTA AGULHA ARRUGA 16CM; PORTA AGULHA BARRAQUER 13CM; PORTA AGULHA BAUMGARTNER 13CM; PORTA AGULHA BOYTON; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14,16,18,20CM – RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO ESPECIAL 14,16,18,20CM – RETO E CURVO; PORTA AGULHA

CASTROVIEJO SIMPLES 14,16,18,20CM – RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO SIMPLES CABO CHATO 14,16,18,20CM – RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO SIMPLES CABO REDONDO 14,16,18,20CM RETO E; CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO CHATO 14,16,18,20CM – RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 14,16,18,20CM – RETO E CURVO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM – FINO RETO; PORTA AGULHA CASTROVIEJO C/ TRAVA RETO 14CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO QUEBRA-GILLETTE; PORTA AGULHA COLLIER 12,5CM; PORTA AGULHA CRILE 15 E 18CM; PORTA AGULHA CRILEWOOD 15,18CM; PORTA AGULHA CRYDER 23,18,24,26 E 30CM; PORTA AGULHA DERF 12CM; PORTA AGULHA DERF ESPECIAL; PORTA AGULHA DERF SIMPLES; PORTA AGULHA FINOCHIETTO 20,27CM; PORTA AGULHA GILLIES 16CM; PORTA AGULHA HALSEY 13CM; PORTA AGULHA HEANEY 21CM; PORTA AGULHA HEEP SCHEIDEL; PORTA AGULHA HERMOLD; PORTA AGULHA JOHNSON 27CM; PORTA AGULHA JACOBSON – RETO E CURVO; PORTA AGULHA JACOBSON CASTRO; PORTA AGULHA JACOBSON ESPECIAL; PORTA AGULHA MASSON 27CM; PORTA AGULHA MATHIEU 11,14,17,20CM; PORTA AGULHA MATHIEU 11,14,17,20CM – ESPECIAL; PORTA AGULHA MATHIEU 11,14,17,20CM – SIMPLES; PORTA AGULHA MATHIEU LIGADURA ELASTICA 11,14CM; PORTA AGULHA MATHIEU ORTO 11,14CM; PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 11,14,16,17,18,20,24,26,30CM; PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 11,14,16,17,18,20,24,26,30CM – ESPECIAL; PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 11,14,16,17,18,20,24,26,30CM – SIMPLES; PORTA AGULHA MICRO 16,18CM FINO; PORTA AGULHA MICRO 16,18CM RETO; PORTA AGULHA OLSEN; PORTA AGULHA OLSEN-HEGAR 14,16,19,20CM; PORTA AGULHA P/ FIO DE AÇO 16,20CM; PORTA AGULHA QUEBRA GILLETTE; PORTA AGULHA QUEBRA GILLETTE ESPECIAL; PORTA AGULHA QUEBRA GILLETTE SIMPLES; PORTA AGULHA RYDER 13, 14, 15,16,18,20,22,23CM; PORTA AGULHA STRATTE 23 cm; PORTA AGULHA WEBSTER 13CM; TRITURADOR DE OSSO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.; PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR; PINÇA PEAN MURPHY; COMPASSO CASTROVIEJO; PINÇA SMITH SEPARADOR DE CAVIDADE; AFASTADOR WEITLANER 3x4 AGUDO 14 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 AGUDO 17 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 AGUDO 21 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 ROMBO 14 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 ROMBO 17 CM; AFASTADOR WEITLANER 3x4 ROMBO 21 CM; ALICATE 058 PARA GANCHO; ALICATE WEINGART MINI; ALICATE WEINGART MINI ESPECIAL; ALICATE 139 ANGLES BENDING

ESPECIAL; ALICATE 222F TORQUE INDIVIDUAL; ALICATE TORQUE S; ALICATE TORQUE INDIVIDUAL COM CHAVE; ALICATE 222M TORQUE INDIVIDUAL; ALICATE 332 ORTODÔNTICO; ALICATE 346R REMOVEDOR DE BRACKET; ALICATE 349 ORTODÔNTICO; ALICATE 410 BARRA PALATINA; ALICATE 452 ORTODÔNTICO; ALICATE REMOVEDOR DE BRACKET CERAMICO; ALICATE BAAD RETO MEIA LUA; ALICATE BAAD RETO PONTA AGUDA; ALICATE ORTO 001 NANCY; ALICATE SACA RESINA; ALICATE SACA RESINA ESPECIAL; DILATADORES SIMS COM 3 RAMOS UTERINO 27CM; ESPECULO HARTMANN VIENNA Nº 1; ESPECULO HARTMANN VIENNA Nº 2; ESPECULO HARTMANN VIENNA Nº 3; ESPECULO RETAL SIMS VAZADO; FORCEPS 101 UNIVERSAL; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 10 CM; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 12 CM; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 15 CM; PAQUÍMETRO PARA ODONTO TIPO AGULHA 20 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 12 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 14 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 16 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 18 CM; PINÇA ALLIS MODIFICADA 20 CM; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON N ° 01; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON N ° 02; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON N ° 03; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON N ° 04; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON N ° 05; PINÇA BABY KHISCHER KERRISON N ° 06; PINÇA BULDOG CURVA 4CM; PINÇA BULDOG CURVA 5CM; PINÇA BULDOG CURVA 6CM; PINÇA BULDOG RETA 4CM; PINÇA BULDOG RETA 5CM; PINÇA BULDOG RETA 6CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 17CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 20CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 23CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA 25CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL CURVA 17CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL CURVA 20CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL CURVA 23CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL CURVA 25CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 17 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 20 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 23 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA RETA 25 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 17 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 20 CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 23CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL ATRAUMÁTICA CURVA 25 CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON CURVA 12 CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON CURVA 18,5 CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON RETA 12CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ADSON RETA 18,5 CM; ESPECULO RETAL SIMS LISO; ESPECULO RETAL MATHIEU; ESPECULO RETAL PRATT; PINÇA KOGAN 24CM 20X3MM; PINÇA KOGAN 24CM 20X7MM; PINÇA HEMOSTÁTICA GAUSS 27CM; PINÇA HEMOSTÁTICA GREEN- ARMYTAGE

21CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH RETA 22CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH RETA 25CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH CURVA 22CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ULRICH CURVA 25CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30° 14CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30° 16CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30° 18CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 30° 20CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60° 14CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60° 16CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60° 18CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 60° 20CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90° 14CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90° 16CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90° 18CM; PINÇA KOCHER ANGULADA 90° 20CM; PINÇA LANE 18CM; PINÇA LANE 22CM; PINÇA LANE 23CM; PINÇA LANE 33CM; PINÇA LANE 45CM; PINÇA MICRO FORCEPS COM PLATAFORMA RETO; PINÇA MICRO FORCEPS COM PLATAFORMA CURVO; PINÇA MULLER; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 20CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 22CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 26CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) RETA 28CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 20CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 22CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 26CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) CURVA 28CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 20CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 22CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 26CM; PINÇA PARAMETRIAL (Z CLAMP) ANGULADA 28CM; PINÇA PORTA ENXERTO VAZADA; PORTA AGULHA MICRO CURVO 16CM; PORTA AGULHA MICRO CURVO 18CM; PORTA AGULHA MATHIEU 11 CM LIGADURA ELÁSTICA FINO; PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM LIGADURA ELÁSTICA FINO; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 16CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 18CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 20CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 22CM; PORTA AGULHA ESPECIAL PARA FIO AÇO 24CM; PORTA AGULHA STEVENS; PORTA AGULHA STEVENSON; PORTA AMALGAMA DUPLO; PORTA AMALGAMA MICRO; PORTA AMALGAMA SIMPLES; PORTA MATRIZ IVORY; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE UNIVERSAL; PORTA OSSO 4,4MM; PORTA OSSO 5,5MM; TRITURADOR RASPADOR P/ OSSO PEQUENO; ABRIDOR DE BOCA ADULTO E INFANTIL; ABRIDOR DE BOCA DENHARD 12CM; ABRIDOR DE BOCA FERGUSSON-ACKLAND 20CM; ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM; ABRIDOR DE BOCA JENNING 9,11,13,15CM; ABRIDOR DE BOCA MASON-ACKLAND 14,20CM; ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO E INFANTIL; ABRIDOR DE BOCA MOLT DOIYEN; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD 11, 13,15CM.; ABRIDOR DE GESSO HENNING 28 cm;

ABRIDOR DE GESSO WOLF 24 cm; AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 16, 18, 20, 22,24CM.; AFASTADOR ADSON 19CM RETA E CURVA; AFASTADOR ALM 10 cm 4X4 DENTES AGUDOS E ROMBOS; AFASTADOR ANKENY GRANDE C/ 8 VALVULA; AFASTADOR ANKENY INFANTIL; AFASTADOR BALFOUR C/ VÁLVULA CURVA 45X80MM; AFASTADOR BALFOUR C/ VÁLVULA RETA 70X100MM; AFASTADOR BALFOUR-BABY; AFASTADOR BECKMAN ADSON 4X4 31 cm.; AFASTADOR CASTROVIEJO 8CM; AFASTADOR COLLIN; AFASTADOR FINOCHIETO 12,13,16,18,21,24,30CM; AFASTADOR FINOCHIETO 16CM 40X40MM; AFASTADOR FINOCHIETTO 21CM 44X65,65X65MM; AFASTADOR FINOCHIETO BURFORD 20, 25,30CM; AFASTADOR FINOCHIETO BABY 8 cm; AFASTADOR FINOCHIETO C/ 6 VALVULA; AFASTADOR DINKHYSEN; AFASTADOR GELPI 18 cm; AFASTADOR GOSSET 12, 16,24,30CM; AFASTADOR GOSSET BABY; AFASTADOR HUMBY DUPLO 11,5CM; AFASTADOR HAIGHT; AFASTADOR HANLEY 16,5CM; AFASTADOR HUMBY 11,5CM; AFASTADOR IVORY; AFASTADOR JANSEN 10CM; AFASTADOR JUDD MASSON; AFASTADOR LA-BORDE 14CM; AFASTADOR LANCASTER 7CM; AFASTADOR MC IVOR C/ SUCÇÃO; AFASTADOR MC IVOR SEM SUCÇÃO; AFASTADOR MILLIN 18CM C/ 5 LÂMINAS; AFASTADOR RIGBY 18CM; AFASTADOR STEVENSON 7CM; AFASTADOR TROUSSEAU 14CM; AFASTADOR WEITLANER 11,5, 13, 16,5, 18, 20, 22, 24, 26, 30CM; AFASTADOR WILIAMS 8CM; AFASTADOR ZIEGLER 7CM; ALICATE BAAD 45° Ponta Aguda; ALICATE BAAD 90° Ponta Aguda; ALICATE BAAD RETO; ALICATE BAAD 90° Meia Lua Aguda; ALICATE BAAD 45° Meia Lua; ALICATE 053 MEIA CANA; ALICATE 58 ORTODÔNTICO; ALICATE 074 TORRE YOUNG; ALICATE 104 ORTODÔNTICO; ALICATE 107 ANGLE; ALICATE 109 DELA ROSA; ALICATE 110 HOW RETO; ALICATE 111 HOW CURVO; ALICATE 112 ORTODÔNTICO; ALICATE 114 JHONSON; ALICATE 115 BICO DE PAPAGAIO; ALICATE 118 ORTODÔNTICO; ALICATE 121 BICO CHATO; ALICATE 122 ORTODÔNTICO; ALICATE 128 ORTODÔNTICO; ALICATE 130 ORTODÔNTICO; ALICATE 137 ORTODÔNTICO; ALICATE 139 ANGLE BENDING; ALICATE 141 FORM MATRIZ; ALICATE 142 ORTODÔNTICO; ALICATE 155 ORTODÔNTICO; ALICATE 157 ORTODÔNTICO; ALICATE 158 ORTODÔNTICO; ALICATE 168 DOBRA "V"; ALICATE 193 ORTODÔNTICO; ALICATE 195 BARRA PALATINA; ALICATE 200 TRIDENTE; ALICATE 210 ORTODÔNTICO; ALICATE 222 ORTODÔNTICO; ALICATE 325 UNIVERSAL; ALICATE 345 ORTODÔNTICO; ALICATE 346 ORTODÔNTICO; ALICATE 346R ORTODÔNTICO; ALICATE 347 ORTODÔNTICO; ALICATE 350 ORTODÔNTICO; ALICATE 401

ORTODÔNTICO; ALICATE 410 ORTODÔNTICO; ALICATE 442 ORTODÔNTICO; ALICATE 442L ORTODÔNTICO; ALICATE 755 JARABAK; ALICATE 1001 ORTODÔNTICO; ALICATE BINLÃO 767; ALICATE CLIP SLB; ALICATE FIXADOR DE GANCHO; ALICATE PARA TORQUE INDIVIDUAL; ALICATE SACA BANDAS; ALICATE TORQUE (FÊMEA); ALICATE TORQUE (MACHO); ALICATE WEINGARTE; ALICATE WEINGART ESPECIAL; DILATADOR GOODELL; DILATADOR WYLIE; DILATADOR LA-BORDE TRAQUEAL 3 RAMOS 15CM; DILATADOR TROUSSEAL 2 RAMOS TRAQUEAL 15CM; DILATADORES WYLIE COM 2 RAMOS UTERINO; ESPECÍMETRO CASTROVIEJO; ESPECÍMETRO CIRÚRGICO; ESPECÍMETRO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE; ESPECÍMETRO IWANSON; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 0,1,2,3 – ADULTO E INFANTIL; ESPÉCULO NASAL; ESPÉCULO NASAL HARTMANN 0,1,2,3,4 – ADULTO E INFANTIL; ESPÉCULO NASAL KILLIAN 1,2,3,4; ESPÉCULO NASAL TIECK HALLE; ESPÉCULO NASAL VIENNA ADULTO, INFANTIL E PEDIATRICO.; ESPÉCULO P/ CADELA C/ REGULAGEM; ESPÉCULO RETAL BODENHAMMER; ESPECULO RETAL DE BEM-SAÚDE; ESPECULO RETAL COLLIN 1,2,3; ESPECULO RETAL KELLY; ESPECULO RETAL MARTIN; ESPECULO RETAL MATHIEU; ESPECULO RETAL MATHIEU TRIVALVE; ESPECULO RETAL PITANGA SANTOS 13 CM; ESPÉCULO RETAL PRATT; ESPÉCULO RETAL SIMS; ESPÉCULO RETAL SMITH BUIE; ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, MÉDIO, GRANDE E PARA VIRGEM; ESPÉCULO VAGINAL COLLIN PEQUENO, MÉDIO, GRANDE E PARA VIRGEM; ESPÉCULO VAGINAL CUSCO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE; ESPÉCULO VAGINAL GRAVES; ESPÉCULO VAGINAL PEDERSON; FÓRCEPS KIELAND P/ OBSTETRÍCIA 39,42CM; FÓRCEPS OBSTÉTRICO DEWEY 37CM; FORCEPS OBSTETRICO DE LEE 37CM; FORCEPS OBSTÉTRICO KIELLAND 39,42CM; FORCEPS OBSTETRICO SIMPSON 30,35CM; FORCEPS OBSTETRICO MARIELE; FORCEPS OBSTETRICO SIMPSON BRAUN 30,35CM; FÓRCEPS OBSTÉTRICO PIPER 40,44CM; FÓRCEPS OBSTÉTRICO TARNIER 40CM; FÓRCEPS 1 ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 2 ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 3 ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 5 ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 10S ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 15 ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 16 ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 17 ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 17L ODONTOLÓGICO ADULTO; 4FÓRCEPS 17R ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 18D ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 18E ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 18L ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 18R ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 21

ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 23	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 23C
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 24	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 27
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 32	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 32A
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 44	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 45
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 45C	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 46
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 53L	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 53R
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 62	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 65
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 68	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 69
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 88L	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 88R
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 99A	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 99C
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 101	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 150
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 151	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 203
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 210	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 213
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 222	ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 286
ODONTOLÓGICO ADULTO; FÓRCEPS 1	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 2
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 3	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 4
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 5	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 6
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 7	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 9
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 16	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 16S
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 17	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 17C
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 18D	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 18E
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 18L	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 18R
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 21	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 23
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 23S	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 27
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 32	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 44
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 46	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 62
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 65	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 68
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 69	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 101
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 106	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 150
ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 151	ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 203

ODONTOLÓGICO INFANTIL; FÓRCEPS 286 ODONTOLÓGICO INFANTIL; MICRO PORTA AGULHA RETO E CURVO 15 E 16CM; PELVÍMETRO COLLYER 30CM; PELVIMETRO COLLIN; PELVÍMETRO MARTIN 34CM; PINÇA ABADIE 27CM; PINÇA ALLIS 12,14,15,16,18,20,22,24,25CM; PINÇA ALLIS ADAIR 15CM; PINÇA ALVEOLÓTOMO BIARTICULADO 18CM; PINÇA ALVEOLÓTOMO LUER – RETO E CURVO; PINÇA ASCH 22CM; PINÇA AUTOCENTRANTE 16,19,24,26 E 28CM; PINÇA BABCOCK 16,18,20,23,24,26,28CM; PINÇA BACKHAUS 8,9,10,11,13,15CM; PINÇA BERNHARD 16CM; PINÇA BEYER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 18CM; PINÇA BEYER SACA BOCADO 18CM; PINÇA BEYER 17 E 18CM; PINÇA BIÓPSIA COMUM, DR.MEDINA E TOMAS GAYLOR; PINÇA BIÓPSIA TOMAS GAYLOR; PINÇA BLAKE 20CM; PINÇA BOZEMANN 26CM RETA E CURVA; PINÇA BRUENNINGS 19CM 00, 01, 02, 3; PINÇA BRUNNER; PINÇA BRYANTS 13CM; PINÇA BUCK 11CM; PINÇA CHEATLE 27CM; PINÇA CHERON 25CM; PINÇA CLAMP FIXAÇÃO 16 E 22CM; PINÇA COLLIN 16,25CM; PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16,25CM; PINÇA COLLIN OVAL/ANEL 17CM; PINÇA COLLIN P/ INSTRUMENTO 1X2 – 20,25CM – RETA E CURVA; PINÇA COLLIN P/ INSTRUMENTO 23CM – RETA E CURVA; PINÇA CRILLE 14,16 E 18 cm, RETA; PINÇA CRILLE 14,16 E 18CM, CURVA; PINÇA DANDY 14CM; PINÇA DARTIGUES 24,27CM; PINÇA DEBAKEY MOSQUITO CURVA 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30CM; PINÇA DEJASDIN 23CM – N° 1,2,3,4; PINÇA DESMARRES 9CM; PINÇA DOYEN INTESTINAL RETA E CURVA 16,18,21,23,25CM; PINÇA DUVAL COLLIN 19.5,20,23CM; PINÇA ECHLIN 23CM; PINÇA FAURE 20, 24CM; PINÇA FAURE 20CM – 1X2 DENTES; PINÇA FEHLAND; PINÇA FINOCHIETO 24CM; PINÇA FOERSTER 16, 18, 20 E 24CM RETA E CURVA; PINÇA FRAENKEL 18,19CM; PINÇA GLOVER 6,7,9,11CM RETA E CURVA; PINÇA GRAY 22,23CM;

Indicação de Uso/Finalidade

Os Instrumentos, devidamente montado e concebido para a finalidade (intervenção e apoio cirúrgico e odontológico, exames e procedimentos laboratoriais) cujas propriedades mecânicas condizem com a sua finalidade e cujos nomes/nomenclaturas determinam padrões, tais como a descrição das medidas, o nome de seu inventor ou um composto científico relacionado ao tipo de cirurgia.

4. Modo de Uso do Produto

4.1. Instruções:

O produto é um material de uso permanente, não estéril, portanto deverá ser esterilizado antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentais cirúrgicos. Após ser utilizado o produto deverá ser lavado e secado imediatamente.

4.2. Utilização:

A utilização dos instrumentos descritos nesse processo deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita aos ambientes clínicos e hospitalares, com os seguintes cuidados:

Manuseio e movimentação:

Os instrumentos devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção técnica, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

Inspeção Técnica:

Todos os instrumentos da família, antes de serem disponibilizados para uso, devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado, objetivando a verificação da sua integridade. O instrumental reprovado deve ser separado para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinado para descarte.

Limpeza:

Os instrumentos devem ser removidos de suas embalagens e limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

IMPORTANTE: Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados. Em hipótese alguma utilize palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo quando saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Esterilização:

Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso. Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento.

NOTA: Todo o instrumental deve ser lavado imediatamente após sua utilização e antes que as secreções ou sangue possam secar. Aqueles que puderem devem ser lavados e desmontados.

4.3. Reutilização:

O processo para reutilização do instrumental cirúrgico envolve, no mínimo, cinco etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágue e a secagem.

Limpeza prévia:

Para limpeza do instrumento, usar somente sabão neutro a 1% ou detergente enzimático neutro. Não usar solução química, por ser corrosiva.

Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados. Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados.

Os instrumentais devem ser introduzidos abertos ou desmontados, quando pertinente.

Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos, para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Deve-se assegurar que o instrumental esteja livre de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microrganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, nãoelimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do material, como no caso de presença excessiva de cloretos.

Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

O instrumental deve ser mergulhado aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas

inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

Descontaminação:

É feita através da imersão do instrumental aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem:

As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias. O instrumental, quando pertinente, deve ser desmontado e cada componente lavado isoladamente. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

Enxágue:

O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente. Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágue do instrumental.

Inspeção e lubrificação:

Após o enxágue, deve-se assegurar que o instrumental esteja livre de quaisquer sujidades ou outros resíduos.

O instrumental deve lubrificado, utilizando-se de óleo mineral não pegajoso, isento de silicone e solúvel em água (hidrosolúvel), que suporte autoclavagem.

Recomenda-se que, quando pertinente, sejam seguidas as instruções do fabricante do lubrificante.

4.4. Descarte:

Quando da necessidade de se descartar o instrumental, o mesmo deve ser inutilizado

imediatamente de forma a evitar que seja utilizado inadvertidamente. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados com identificação clara de que se trata de lixo contaminante. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar os instrumentais, deve-se seguir os procedimentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

4.5. Manutenção e conservação

- ✓ Examine o instrumento antes do uso. NUNCA o utilize em caso de defeito, presumido ou aparente.
- ✓ Em qualquer tipo de água há concentração de sais. Mesmo em uma água considerada potável, existe a possibilidade de concentração de certos elementos químicos que poderão danificar os instrumentos.
- ✓ Se na água houver alguma concentração de Ferro, Cobre, Manganês, Magnésio ou Silício poderá haver a formação de manchas com cores diversas: marrom, azul ou arco-íris. Nesse caso não se trata de corrosão, mas sim de manchas.
- ✓ Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e/ou corrosão.
- ✓ Não armazenar o instrumental perto de produtos químicos que possam desprender gases corrosivos, a saber: Cloro, Iodo e Ácidos em geral.
- ✓ Cada instrumento foi criado e desenvolvido para executar uma determinada função, portanto, ele não deve ser utilizado fora dessas condições. Os instrumentos utilizados fora das suas condições normais de trabalho podem quebrar ou ter a sua vida útil reduzida.

5. Método de esterilização

Produto não Estéril, esterilização executada nos hospitais e clínicas, cujo o processo mais utilizado é o auto clave nas seguintes temperaturas:

Temperatura (°C)	Tempo (min)
121 (1,0 atm)	20
126 (1,4 atm)	10

O aquecimento e o esfriamento dos instrumentais provocam dilatações e contrações.

Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual, a qual poderá apresentar manchas e/ou corrosão no instrumental.

O produto após esterilizado deve ser armazenado em sua embalagem não violável, seguindo os cuidados básicos de armazenagem.

6. Condições de armazenamento

O instrumental deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e evitando danificação da embalagem. O indicado é armazenar em local limpo, arejado, a temperatura ambiente, ao abrigo de luz direta, seco e com baixa contaminação por partículas. Devem ser evitados riscos, dobras ou entalhes dos instrumentos cirúrgicos, visto que tais fatores aumentam a possibilidade de corrosão dos produtos.

As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação dos instrumentos devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos para saúde.

7. Condições para o transporte

Os instrumentais devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteração de suas características físicas ou qualquer deterioração da embalagem. Não são aplicáveis parâmetros específicos de temperatura e umidade.

É recomendado que o responsável pelo transporte evite choques mecânicos.

8. Condições de Manipulação

Os instrumentos devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção prévia, mesmo que já tenha passado por esta etapa.

9. Advertências

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para finalidades diferentes podem prejudicar a evolução do procedimento. A combinação dos produtos GOLGRAN com os de outros fabricantes pode apresentar diferenciação em material, em desenho ou qualidade. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso dos instrumentais ou das suas partes. Havendo desempenho variado, perda de precisão, instabilidade ou falta de precisão deve-se imediatamente substituir a peça.

10. Precauções

Os instrumentos devem ser mantidos em suas embalagens originais até a sua esterilização e uso. Após o uso, deve ser realizada uma limpeza correta, a fim de evitar incrustações e corrosões. Verificar, a cada uso, se os instrumentais não sofreram dano.

Somente profissionais especializados e treinados nas técnicas cirúrgicas poderão utilizar estes instrumentais.

Os instrumentais não devem ser armazenados em local onde também são armazenados produtos químicos que podem exalar vapores corrosivos.

Ainda que os instrumentais sejam fabricados em material oxidável, o correto manuseio e manutenção adequada do material é imprescindível para a conservação de suas características. Dessa forma, é indicado que sejam seguidas as orientações do fabricante quanto aos processos de limpeza, esterilização, manuseio, transporte e armazenamento.

11. Contraindicações

Não se aplica

12. Efeitos adversos

Não se aplica

13. Restrições ao uso

Por se tratar de um instrumental cirúrgico ou odontológico o mesmo deverá ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas e a critérios médicos.