

Seringa Hipodérmica com Agulha Descartável Descarpack



DADOS TÉCNICOS

- Cilindro transparente confeccionado em polipropileno;
- Agulha acoplada removível confeccionada em aço inoxidável;
- Matéria-prima inerte,
- Estéril;
- Para uso manual;
- Lubrificadas, garantindo um movimento suave do êmbolo e reduzindo a pressão exigida durante a manipulação do dispositivo;
- Embaladas individualmente em filme termoplástico e em papel grau cirúrgico;
- A Seringa Hipodérmica com Agulha Descartável Descarpack é indicada para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa, e em diferentes formas farmacêuticas, podendo ser: veículos aquosos, veículos oleosos, pó em suspensão e pó para ressuspender/reconstituir;
- A Seringa Hipodérmica com Agulha Descartável Descarpack atende as normas ABNT NBR ISO 7864:2020, ABNT NBR ISO 594-1:2003, ABNT NBR ISO 9626:2020, as Portarias do INMETRO nº 503 de 29 de dezembro de 2011, nº 84 de 10 de fevereiro de 2021 e as resoluções RDC nº 27 e 28 de 14 maio de 2014.

MODELOS DISPONÍVEIS

Seringa Hipodérmica Luer Slip Descarpack

Modelo	Tamanho da Agulha
3 mL	25 x 0,70 mm
5 mL	25 x 0,70 mm
10 mL	25 x 0,70 mm
20 mL	25 x 0,70 mm

MODELOS CADASTRADOS

Seringa Hipodérmica Luer Slip Descarpack

Modelo

1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
60 mL

Agulhas

Tamanho

40 X 1,60
40 X 1,20
25 X 1,00
30 X 1,00
25 X 0,90
30 X 0,90
25 X 0,80
30 X 0,80
40 X 0,80
25 X 0,70
30 X 0,70
25 X 0,60
20 X 0,55
13 X 0,45
13 X 0,40
13 X 0,38
13 X 0,30

Seringa Hipodérmica Luer Lock Descarpack

Modelo

1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
60 mL

Agulhas

Tamanho

40 X 1,60
40 X 1,20
25 X 1,00
30 X 1,00
25 X 0,90
30 X 0,90
25 X 0,80
30 X 0,80
40 X 0,80
25 X 0,70
30 X 0,70
25 X 0,60
20 X 0,55
13 X 0,45
13 X 0,40
13 X 0,38
13 X 0,30

INSTRUÇÕES DE USO

1. Lavar as mãos antes de preparar a injeção;
2. Abrir a embalagem da seringa utilizando o local correto de abertura;
3. Conectar a agulha de tamanho e calibre apropriado;
4. Retirar o protetor da agulha e aspirar o medicamento;
5. Realizar anti-sepsia do local da aplicação com algodão e álcool 70%;
6. Ao final da injeção, descartar a seringa em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- Proibido reprocessar;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Após o uso descartar em local apropriado.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente próprio para perfurocortantes (grupo E de acordo com a RDC 222/2018).

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante Responsável: Lifelong Meditech Limited

Importado e Distribuído por: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

Notificação Anvisa: 10330660046

Responsável Técnica: Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269