

Cadeira de Rodas

MODELO D700

Português / espanhol



dellamed
Home

1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Rodas Manual Modelo D700.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro da sua cadeira de rodas.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do registro: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário

CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

Fabricante: Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd.

Endereço: N° 77 Yandushan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu, 212132 China.

Registro da Anvisa: 80795950058



QUEREMOS OUVIR VOCÊ!

Atendimento ao Consumidor:

0800.604.800 8

assistenciatecnica@dellamed.com.br

2. CONHECENDO O PRODUTO

A imagem abaixo apresenta a sua Cadeira de Rodas D700 e seus principais componentes com suas respectivas terminologias:



COMPONENTE	QTDE.
1. Apoio de Cabeça	1
2. Encosto Reclinável	1
3. Cinto Torácico	1
4. Manopla	2
5. Apoio de Braço - Escamoteável	2
6. Assento com Almofada	1
7. Roda Traseira	2


COMPONENTE	QTDE.
8. X Simples em Alumínio	1
9. Freio	2
10. Roda Dianteira	2
11. Apoio de Pernas Regulável com angulação e apoio de panturrilha	2
12. Apoio de Pés	2
13. Anti-tombo	2

3. ESPECIFICAÇÕES

Modelo					D700			
Peso máximo suportado					130 kg			
Medidas aproximadas da cadeira aberta (CxLxA)					T40 - C116,5 x L63,7 x A113 cm			
					T44 - C116,5 x L66,2 x A113 cm			
					T48 - C116,5 x L71,3 x A113 cm			
Medidas aproximadas da cadeira dobrada com os apoios de pés removidos (CxLxA)					T40 - C90 x L31 x A113 cm			
					T44 - C90 x L31 x A113 cm			
					T48 - C90 x L31 x A113 cm			
Peso líquido do produto					T40 - 18,3 kg			
					T44 - 18,5 kg			
					T48 - 18,9 kg			
Medidas aproximadas		D700 - T40		D700 - T44		D700 - T48		
Largura do Assento		40 cm		44 cm		48 cm		
Profundidade do assento		44 cm		44 cm		44 cm		
Altura do assento ao piso		47 cm		47 cm		47 cm		
Altura do encosto das costas		45 cm		45 cm		45 cm		
Altura entre o apoio para os braços e o assento		18 cm		18 cm		18 cm		
Distância entre os braços		41 cm		45 cm		49 cm		
Diâmetro externo da roda traseira		61 cm	24"	61 cm	24"	61 cm	24"	
Diâmetro externo do aro de propulsão		51 cm		51 cm		51 cm		
Diâmetro externo da roda dianteria		15,24 cm	6"	15,24 cm	6"	15,24 cm	6"	

4. MONTAGEM

PASSO 1: Empurre os tubos laterais do assento para os lados até que a cadeira esteja completamente aberta. Nesta etapa, certifique-se de manter os dedos longe das partes móveis para evitar acidentes.

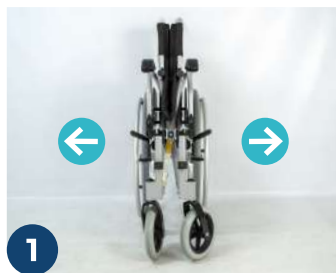


Nota: Os tubos do assento devem estar totalmente engatados no suporte da estrutura do assento antes de se sentar, como indicado no quadro 3.

PASSO 2: Para encaixar o apoio para pés, posicione seu pino sobre o furo de encaixe da estrutura. Após gire-o de fora para dentro em 90°, segurando o manípulo da trava. Certifique-se de ouvir um som de clique, confirmando que o apoio para pés foi encaixado corretamente.

Nota: O apoio para pés possui apoio de panturrilha incluso, para regulação:

O movimento de elevação não necessita acionar nenhum botão, apenas regular de acordo com o desejado; para o movimento de declinar é preciso acionar o pino o regular conforme a necessidade.

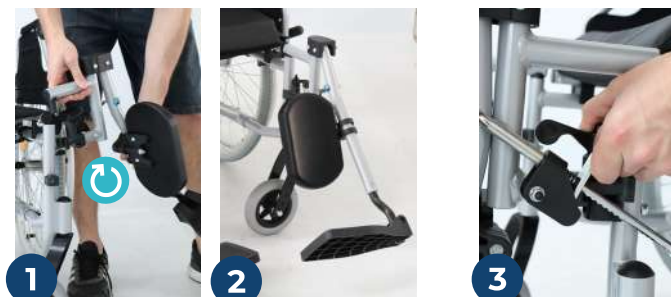

PASSO 3: Montar o apoio de cabeça, posicionando a sua estrutura em paralelo com as manoplas e rosqueando os parafusos, unindo as duas partes.



PASSO 4: Finalize a montagem da cadeira colocando a almofada, pressionando-a sobre a cadeira para fixá-la sob o velcro.



1 - Apoio de cabeça:

O apoio de cabeça possui ajuste de altura e profundidade: basta remover o parafuso rosqueando o manipulador e ajustando de acordo com a necessidade do paciente.

Nota: pode-se ajustar a angulação do apoio de cabeça movendo-o para cima ou baixa, de acordo com a necessidade;



2 - Regulagem da inclinação do encosto:

(110° a 135°) Basta acionar ambos os lados da alavanca (abaixo do manipulador) simultaneamente e inclinar ou elevar a cadeira da maneira desejada. É necessário se atentar se ambos os lados encaixados e totalmente fixos antes de soltar o acionamento.



3 - Ajustes do anti-tombo:

O anti-tombo é montado com pino "E" e possui 3 ajustes de altura – chão. É necessário assegurar que o pino "E" esteja completamente acoplado para evitar quebra.



4 - Ajuste da almofada da panturrilha:

A almofada do suporte de panturrilha possui 4 níveis de posição e regulagem de angulação, sendo também rebatível.



5 - Cinto torácico

Cinto de segurança torácico – a cadeira de rodas D700 possui cinto torácico incluso e já montado, sendo necessário apenas o ajuste de tamanho conforme o usuário.



6. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA USO

6.1 Diretrizes gerais:

É essencial ler e entender completamente este manual antes de montar ou usar esta cadeira de rodas. Ressaltamos que as cadeiras de rodas são destinadas exclusivamente ao uso pessoal de indivíduos com mobilidade reduzida. Não exceda o peso máximo suportado por este produto, pois o excesso de peso acelerará o desgaste, aumentando o risco de quedas, tombos ou perda de controle, podendo causar danos graves ao usuário ou a outras pessoas.

Recomendamos a escolha de uma cadeira de rodas que atenda às necessidades do usuário e que seja aprovada por um profissional habilitado. A decisão adequada depende de fatores como aptidão, força, equilíbrio, coordenação e as diversas situações diárias que o usuário enfrentará (como locais de residência, trabalho e outros lugares onde a cadeira será utilizada). Considere também a inclusão de opcionais para segurança e conforto, como rodas antitombo, cintos ou sistemas de assento especiais.

Antes de utilizar o produto, verifique se todas as partes e acessórios estão montados corretamente, as rodas estão em boas condições de funcionamento, a cadeira está nivelada e todas as rodas estão em contato com o chão durante o uso.

Para uso seguro, lembre-se:

- Respeite os limites de alcance para objetos, inclinação para trás, ângulos máximos de inclinação, uso dos freios manuais, tipo de pneus e limite de peso.

- Os suportes de apoio dos pés são projetados apenas para sustentar os pés enquanto estiver sentado. Não fique em pé sobre eles. Tome cuidado próximo a chamas abertas ou cigarros acesos.

ATENÇÃO: Qualquer modificação no produto sem a permissão expressa da Dellamed invalidará a garantia.

6.2 Utilização em terrenos diversos:

Terreno: Evite utilizar a cadeira em terrenos perigosos, como ladeiras muito íngremes, pisos escorregadios, cascalho solto ou grama molhada.

Escadas Rolantes: Não utilize a cadeira de rodas em escadas rolantes.

Uso em trânsito: Lembre-se de que, ao usar a cadeira de rodas na rua, você está sujeito às regras de trânsito. Em ambientes com pouca visibilidade, vista roupas claras ou com adesivos refletivos para ser facilmente visto por terceiros.

Usuário: Certifique-se de que qualquer pessoa que o auxilie leu e segue todas as advertências e instruções deste manual.

Siga sempre as orientações do seu médico, enfermeira ou terapeuta, e aprenda métodos seguros de uso de acordo com suas habilidades.

6.3 Aspectos de segurança:

Centro de equilíbrio: O centro de equilíbrio da cadeira de rodas é influenciado por fatores como a altura da cadeira, a distância entre as rodas traseiras, a altura e o ângulo do assento, bem como a postura e a distribuição de peso do usuário. Ao subir rampas ou aclives e transportar objetos na parte de trás da cadeira, o centro de equilíbrio pode ser afetado. É essencial consultar um médico ou fisioterapeuta para determinar o melhor centro de equilíbrio para você. Antes de fazer qualquer modificação ou ajuste na cadeira, consulte seu revendedor autorizado, pois podem ser necessárias outras mudanças para corrigir o centro de equilíbrio. Tenha cuidado e sempre solicite ajuda até que você conheça o centro de equilíbrio ideal da sua cadeira para evitar possíveis acidentes.

Obstáculos: Buracos, elevações e pavimentos quebrados podem danificar a cadeira de rodas e causar quedas ou perda de controle. Ao encontrar obstáculos, mantenha as mãos no aro de impulsão e avalie a situação antes de prosseguir. Nunca empurre ou puxe objetos, pois isso pode impulsionar a cadeira de rodas de forma inesperada.

6.3.1 Ajudando o usuário a subir um meio-fio:

- Fique atrás da cadeira de rodas.
- Incline a cadeira de rodas para cima nas rodas dianteiras, fazendo-as subir o meio-fio.
- Avance até que as rodas dianteiras estejam no nível superior do meio-fio.
- Avance, encostando as rodas dianteiras no nível superior.
- Continue avançando até que as rodas traseiras encostem à face do meio-fio.
- Erga e role as rodas traseiras até o nível superior.

6.3.2 Ajudando um usuário de cadeira de rodas a descer um meio-fio:

- Fique atrás da cadeira de rodas.
- Vire a cadeira de rodas antes de se aproximar da extremidade do meio-fio e puxe para trás.
- Desça cuidadosamente até estar fora do meio-fio ou degrau.
- Puxe a cadeira de rodas até que as rodas traseiras alcancem a extremidade do meio-fio e permita que rolem lentamente para o nível abaixo.
- Incline a cadeira de rodas para trás, levantando as rodas dianteiras do meio-fio quando as rodas traseiras estiverem seguras no nível abaixo.
- Mantenha a cadeira de rodas equilibrada e dê passos pequenos para trás.
- Vire a cadeira de rodas e abaixe suavemente as rodas dianteiras até o chão.

Lembre-se de sempre subir e descer declives e aclives em linha reta para evitar o risco de capotamento da cadeira de rodas. Evite declives acentuados, pois podem causar instabilidade.

6.4 Utilização da cadeira de rodas:

Inclinando-se para a frente: Posicione a cadeira de rodas o mais próximo possível do objeto que deseja alcançar. Estenda os rodízios dianteiros para a frente e trave as rodas traseiras. Estenda apenas o braço para pegar objetos ao alcance do comprimento do braço, permanecendo sentado na posição normal.

Inclinando-se para trás: Posicione a cadeira de rodas próxima ao objeto desejado. Estenda o braço apenas até onde alcançar sem alterar a posição. Evite se inclinar sobre a parte superior do estofamento traseiro para não mudar o centro de gravidade e evitar tombos.

Inclinando-se para os lados: Mova a cadeira de rodas próxima ao objeto desejado e alinhe os rodízios frontais na direção desejada. Trave as rodas traseiras completamente. Não mude a posição sentada ou o centro de gravidade em direção ao objeto que está alcançando, para evitar tombos.

Transferência: Antes de sentar ou sair da cadeira de rodas, assegure-se de que o espaço entre os dois assentos seja mínimo. Certifique-se de travar as rodas para evitar o movimento da cadeira. Gire os rodízios na direção do assento para o qual deseja mover-se. Levante os pés e dobre os suportes dos pés para o lado, mas nunca fique de pé sobre eles. É essencial que as transferências sejam supervisionadas por um profissional de saúde capacitado até que o usuário da cadeira de rodas esteja familiarizado com o procedimento.

6.5 Soltando a roda da estrutura principal:

A sua cadeira de rodas possui o sistema *Quick Release*, tornando a etapa de desencaixe muito simples. Para soltá-la, basta pressionar o centro da roda, como indicado a seguir:



6.6 Ajustando a altura do apoio para pés:

Solte o parafuso localizado abaixo do apoio para pés, utilizando a chave sextavada e a chave allen. Ao soltá-lo, ajuste o apoio para pés na altura desejada e, por fim, realize o aperto do parafuso.



7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Sua cadeira de rodas foi projetada para garantir durabilidade e segurança, proporcionando uma experiência confiável de mobilidade. Para assegurar o melhor desempenho e prolongar a vida útil da cadeira, é importante realizar uma manutenção preventiva regularmente.

Medidas preventivas semanais:

- Verifique o estado geral da cadeira de rodas, incluindo a integridade das estruturas, partes metálicas e componentes.
- Verifique se há folgas, desgaste excessivo ou sinais de danos nas rodas e pneus.
- Limpe os estofados do encosto e assento com uma solução de sabão neutro e água para mantê-los em boas condições.
- Certifique-se de que os freios estão funcionando corretamente, e não apresentam desgaste ou folga.

Medidas Preventivas Mensais:

- Lubrifique o parafuso central da barra transversal (duplo X) com óleo de máquina multiuso para garantir seu bom funcionamento.
- Verifique a integridade dos pneus para garantir a estabilidade e melhor desempenho nas rodas.
- Verifique a fixação das rodas nos rodízios e aperte o parafuso e porca, conforme necessário, para permitir giro livre.
- Verifique se os freios das rodas traseiras estão em bom estado e funcionando adequadamente.
- Verifique a integridade dos elementos de fixação das rodas traseiras.

Medidas Preventivas Trimestrais:

- Realize uma inspeção detalhada da cadeira de rodas, incluindo todas as partes e componentes para detectar sinais de desgaste ou possíveis danos.
- Certifique-se de que todas as partes metálicas estejam limpas, livres de corrosão e mantenham o acabamento adequado.
- Verifique a estabilidade e alinhamento das rodas, corrigindo eventuais desalinhamentos.
- Certifique-se de que o centro de equilíbrio da cadeira de rodas está ajustado corretamente.

Medidas Preventivas Semestrais:

- Realize uma verificação completa da cadeira de rodas, incluindo sistema de fechamento e abertura, garantindo que todas as partes estejam funcionando sem problemas.
- Verifique se todas as peças e componentes estão devidamente fixados e aperte os parafusos conforme necessário.
- Inspeccione os suportes de apoio dos pés e certifique-se de que estão em boas condições.

Medidas Preventivas Anuais:

- Realize uma manutenção abrangente com um profissional especializado para verificar todos os sistemas e componentes da cadeira de rodas.
- Realize a troca dos pneus e rodas, caso necessário, para garantir a segurança e desempenho adequados.
- Essas medidas preventivas são essenciais para garantir o melhor desempenho e a durabilidade de sua cadeira de rodas manual. Lembre-se de que a manutenção regular é fundamental para assegurar sua segurança e conforto durante o uso. Em caso de dúvidas ou necessidade de assistência técnica, entre em contato com a Dellamed ou um posto autorizado.

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A tabela abaixo lista as causas de problemas mais comuns e suas respectivas soluções. Caso o problema persista ou não esteja listado nesta tabela, entre em contato com nossa assistência técnica ou procure um posto autorizado.

Causa	Possível solução
A cadeira de rodas move-se irregularmente (guinadas para um dos lados).	• Verifique a integridade dos pneus traseiros e, se necessário, troque-os. • Verifique se alguma das rodas está travada e destrave-a. • Certifique-se de que ambas as rodas dianteiras estejam em contato com o solo e verifique se há avarias.
• A cadeira de rodas vibra e apresenta ruídos.	• Reaperte os parafusos se necessário, aplique óleo lubrificante nas áreas com peças móveis. • Verifique se ambas as rodas dianteiras estão em contato com o solo e substitua os pneus traseiros, caso necessário.
• O freio não está mais travando adequadamente.	• Verifique a banda de rodagem dos pneus e troque-os caso estejam desgastados. • Verifique a integridade dos pneus traseiros e faça a regulagem correta dos dispositivos de freio.
• A barra transversal (X simples) está apresentando rigidez ao abrir e fechar a cadeira de rodas.	• Lubrifique o parafuso central da barra com óleo de máquina multiuso.
• As rodas dianteiras não estão funcionando corretamente.	• Verifique regularmente se o parafuso e a porca que prendem a roda ao garfo do rodizio estão apertados adequadamente, permitindo giro livre.
• A cadeira de rodas apresenta instabilidade.	• Verifique o desgaste dos pneus. Caso seja necessário realizar a troca, troque ambos os pneus ao mesmo tempo para não comprometer a estabilidade da cadeira de rodas. • Verifique se as rodas giram livremente.

9. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

a) O produto acima identificado possui garantia legal de 90 (noventa) dias para todos os seus componentes, sendo estes: tecido do encosto, tecido do assento, almofada, apoio de braço, rodas, manoplas, peseiras e pedais, freios, garfo dianteiro, rolamentos, peças plásticas e apoio de cabeça. Findando este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual de:

• 9 (nove) meses para a estrutura - totalizando 1 (um) ano de garantia;

• 3 (três) meses para demais componentes;

b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.

c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.

d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.

e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade apresentada pela Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela fabricante.

b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada dentro do mesmo perímetro urbano do consumidor, são de responsabilidade do usuário.

c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas à Dellamed se encontra disponível no website oficial da fabricante: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada à Dellamed;

b) Alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;

c) O desgaste natural do produto;

d) Danos decorrentes de falhas ou sobrecargas no fornecimento de energia elétrica;

e) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;

f) Ligação do produto em rede elétrica/tensão inadequada, ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

g) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;

h) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;

i) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;

j) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;

k) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inadequado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;

l) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;

m) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;

n) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inadequado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;

o) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;

p) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;

q) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

Sillas de ruedas

MODELO D700

1. INTRODUCCIÓN

Apreciado Cliente,

Gracias por adquirir su Silla de Ruedas Manual Modelo D700.

Este Manual de Instrucciones contiene las recomendaciones necesarias para el uso adecuado y seguro de su silla de ruedas.

CONOZCA DELLAMED

Creada en 2010, en la ciudad de Caxias do Sul - RS, Dellamed es sinónimo de calidad e innovación. Buscando siempre el buen servicio, Dellamed tiene como lema principal la salud de los clientes en 1º lugar, buscando así ofrecer los mejores productos del mercado para poder atender eficientemente a todos los consumidores finales.

DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsable Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Dirección: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Barrio Cinquentenário CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS – Brasil

Fabricante: Jiangsu Intco Medical Products Co., Ltd.

Dirección: N° 77 Yandushan Road, Dagang Zhenjiang, Jiangsu, 212132 China.

2. CONOCER EL PRODUCTO

La siguiente imagen muestra su silla de ruedas D700 y sus componentes principales con sus respectivas terminologías:



COMPONENTE	QTDE.
1. Apoyo de cabeza	1
2. Respaldo reclinable	1
3. Cinturón Torácico	1
4. Manija	2
5. Apoyabrazos - Retráctil	2
6. Asiento con cojín	1
7. Rueda Trasera	2

COMPONENTE	QTDE.
8. X simple en aluminio	1
9. Freno	2
10. Rueda Delantera	2
11. Soporte para piernas ajustable con angulación y soporte para pantorrilla	2
12. Reposapiés	2
13. Anti vuelco	2

3. ESPECIFICACIONES

Modelo				D700			
Peso Maximo Soportado				130 kg			
Medidas aproximadas de la silla abierta (C x L x A)				T40 - C116,5 x L63,7 x A113 cm			
				T44 - C116,5 x L66,2 x A113 cm			
				T48 - C116,5 x L71,3 x A113 cm			
Medidas aproximadas de la silla doblada sin los reposapiés (C x L x A)				T40 - C90 x L31 x A113 cm			
				T44 - C90 x L31 x A113 cm			
				T48 - C90 x L31 x A113 cm			
Peso Liquido del producto				T40 - 18,3 kg			
				T44 - 18,5 kg			
				T48 - 18,9 kg			
Medidas aproximadas	D700 - T40		D700 - T44		D700 - T48		
Ancho del asiento	40 cm		44 cm		48 cm		
Profundidad del asiento	44 cm		44 cm		44 cm		
Altura del asiento al suelo	47 cm		47 cm		47 cm		
Altura del respaldo	45 cm		45 cm		45 cm		
Altura entre el apoyabrazos y el asiento	18 cm		18 cm		18 cm		
Distancia entre los brazos	41 cm		45 cm		49 cm		
Diámetro exterior de la rueda trasera	61 cm	24"	61 cm	24"	61 cm	24"	
Diámetro exterior del borde de propulsión	51 cm		51 cm		51 cm		
Diámetro exterior de la rueda delantera	15,24 cm	6"	15,24 cm	6"	15,24 cm	6"	

4. MONTAJE

PASO 1: Empuje los tubos laterales del asiento hacia los lados hasta que la silla esté completamente abierta. En este paso, asegúrese de mantener los dedos alejados de las piezas móviles para evitar accidentes.




Nota: Los tubos del asiento deben estar completamente enganchados en el soporte del marco de la silla antes de sentarse, como se muestra en la tabla 3.

PASO 2: Para colocar el reposapiés, coloque su pasador sobre el orificio de montaje del marco. Luego gírelo de afuera hacia adentro 90°, sujetando la manija de bloqueo. Asegúrese de escuchar un clic, lo que confirma que el reposapiés se ha colocado correctamente.

Nota: El reposapiés lleva incluido un soporte para pantorrillas, para su ajuste:

El movimiento de elevación no requiere presionar ningún botón, solo ajustar según se desee; para el movimiento de descenso es necesario activar el pasador o ajustarlo según sea necesario.

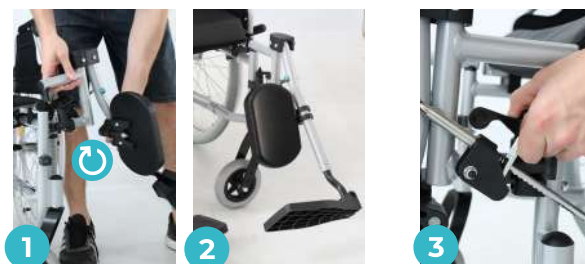

PASO 3: Montar el apoyo de cabeza, posicionando su estructura en paralelo a las manijas y enroscando los tornillos, uniendo las dos partes.



PASO 4: Termine de armar la silla colocando el cojín, presionándolo sobre la silla para asegurarlo sobre el velcro.



1 - Soporte para la cabeza:

El Apoyo de cabeza tiene regulación en altura y profundidad: basta con quitar el tornillo, enroscar el mango y ajustar según las necesidades del paciente.

Nota: puede ajustar el ángulo del apoyo de cabeza moviéndolo hacia arriba o hacia abajo, según sus necesidades;



2 - Regulación de la inclinación del respaldo:

(110° a 135°) Simplemente active ambos lados de la palanca (debajo del mango) simultáneamente e incline o levante la silla como desee. Es necesario asegurarse de que ambos lados estén enganchados y completamente fijos antes de soltar el accionamiento.



3 - Ajustes antivuelco:

El dispositivo anticaída se monta con un pasador "E" y tiene 3 configuraciones. altura – piso. Es necesario asegurarse de que el pasador "E" esté completamente enganchado para evitar roturas.



4 - Ajuste de la almohadilla para las pantorrillas:

El antivuelco se monta con pasador "E" y tiene 3 ajustes de altura – piso. Es necesario asegurarse de que el pasador "E" esté completamente enganchado para evitar roturas.



5 - Cinturón de seguridad Torácico:

La silla de ruedas D700 incluye un cinturón torácico el cual ya está ensamblado, que solo requiere ajuste de tamaño según el usuario.



6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Su silla de ruedas está diseñada para brindar durabilidad y seguridad, otorgando una experiencia de movilidad confiable. Para garantizar el mejor rendimiento y prolongar la vida útil de su silla, es importante realizar un mantenimiento preventivo con regularidad.

Medidas Preventivas Semanales:

- Verificar el estado general de la silla de ruedas, incluyendo la integridad de estructuras, partes metálicas y componentes.
- Revise las ruedas y los neumáticos en busca de flojedad, desgaste excesivo o signos de daño.
- Limpiar el tapizado del respaldo y del asiento con una solución de agua y jabón suave para mantenerlos en buen estado.
- Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente y no tengan desgaste ni juego.

Medidas Preventivas Mensuales:

- Lubrique el tornillo central del travesaño (doble X) con aceite de máquina multiusos para garantizar su correcto funcionamiento.
- Verifique la integridad de los neumáticos para garantizar la estabilidad y un mejor rendimiento de las ruedas.
- Verifique la fijación de las ruedas en el tenedor y apriete el perno y la tuerca según sea necesario para permitir que giren libremente.
- Comprobar que los frenos de las ruedas traseras estén en buen estado y funcionando correctamente.
- Comprobar la integridad de las fijaciones de las ruedas traseras.

Medidas Preventivas Trimestrales:

- Realice una inspección detallada de la silla de ruedas, incluidas todas las piezas y componentes, en busca de signos de desgaste o posibles daños.
 - Asegúrese de que todas las piezas metálicas estén limpias, libres de corrosión y mantengan un acabado adecuado.
 - Verificar la estabilidad y alineación de las ruedas, corrigiendo las desalineaciones.
- Asegúrese de que el centro de equilibrio de la silla de ruedas esté ajustado correctamente.

Medidas Preventivas Semestrales:

- Efectuar una revisión completa de la silla de ruedas, incluido el sistema de cierre y apertura, asegurándose de que todas las piezas funcionen correctamente.
- Verifique que todas las piezas y componentes estén correctamente asegurados y apriete los tornillos según sea necesario.
- Inspeccione los reposapiés y asegúrese de que estén en buenas condiciones.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La siguiente tabla enumera las causas de los problemas más comunes y sus soluciones. Si el problema persiste o no se encuentra en esta tabla, comuníquese con nuestra asistencia técnica o busque un centro de servicio autorizado.

Causa	Posible Solución
La silla de ruedas se mueve de forma errada (se balancea hacia un lado).	• Verificar la integridad de los neumáticos traseros y, si es necesario, cambiarlos. • Compruebe si alguna de las ruedas está bloqueada y desbloquéela. • Asegúrese de que ambas ruedas delanteras estén en contacto con el suelo y compruebe si hay daños.
La silla de ruedas vibra y hace ruido.	• Vuelva a apretar los pernos si es necesario, aplique aceite lubricante en las áreas con piezas móviles. • Compruebe que ambas ruedas delanteras estén en contacto con el suelo y sustituya los neumáticos traseros si es necesario.
El freno ya no se bloquea correctamente.	• Revisar la banda de rodadura de los neumáticos y cambiarlos si están desgastados. • Verificar la integridad de los neumáticos traseros y realizar el ajuste correcto de los dispositivos de frenado.
El travesaño o barra transversal (Doble X) está rígida al abrir y cerrar la silla de ruedas.	• Lubrique el perno central de la barra con aceite para máquinas multipropósito.
Las ruedas delanteras no funcionan correctamente.	• Verifique regularmente que el perno y la tuerca que sujetan la rueda a la horquilla de la rueda delantera estén apretados, permitiendo que la rueda gire libremente.
La silla de ruedas es inestable.	• Comprobar el desgaste de los neumáticos. Si es necesario cambiarlos, cambie los dos neumáticos al mismo tiempo para no comprometer la estabilidad de la silla de ruedas. • Compruebe que las ruedas giren libremente.

dellamed



Versão 00 – Data 26/07/2024