

Cristaline

Seringa de Alta Transparência



Reg. Anvisa nº: 81676079003

Descrição geral do produto

Seringa de alta transparência, sem agulha, com capacidade de 1ml, bico Luer Lock, esterilizada por Óxido de Etileno, de uso único.


A seringa Cristaline é composta por cilindro de policarbonato PC (ABNT NBR 15804-1:2010) de alta transparência; Êmbolo, capa da seringa e adaptador para transferência em Polipropileno PP; e Ponta zero resíduo de borracha nitrílica (NBR).

Possui adaptador de transferência, permitindo unir duas seringas Luer Lock ou outros dispositivos Luer Lock para facilitar a transferência de fluidos.

A qualidade de zero resíduo faz com que a seringa Cristaline seja ideal para a medicina estética (mesoterapia ou intradermoterapia e aplicação de Toxina Botulínica), além dos procedimentos realizados na odontologia, neurorradiologia, neonatal, angiologia, pediatria e outros procedimentos em conformidade com as normas ISO.

Embalada individualmente em papel de grau cirúrgico, esterilizada.

Partes da seringa Cristaline

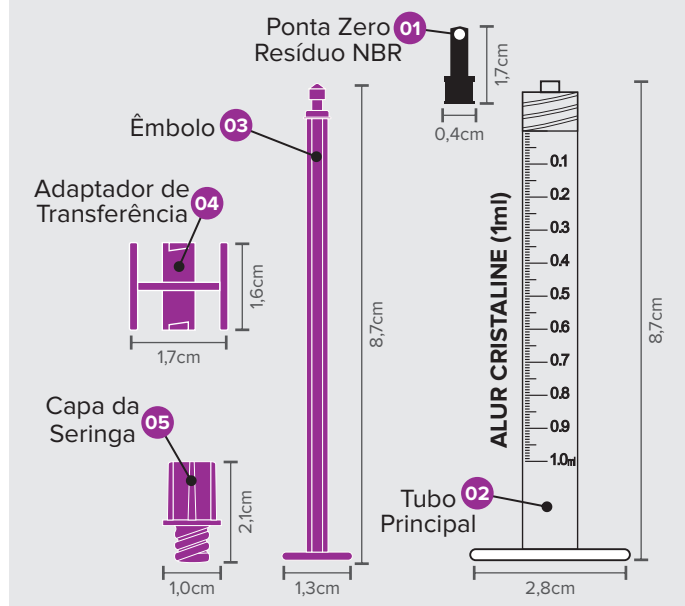

Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Óxido de Etileno, livre de pirogênios e metais pesados.
- Produto destinado a ambiente asséptico.



IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar o produto de acordo com os critérios vigentes de biossegurança.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;

2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);

3. Para transferência de fluidos, conectar o adaptador de transferência para unir a seringa a outros dispositivos Luer Lock, girar em sentido horário para travar;

4. Para usar, conectar a agulha a ser utilizada ao bico da seringa, realizando uma leve torção rotacional, travando a agulha;

5. Utilizar a seringa conforme técnica adequada para administração de medicamentos ou coletas de fluidos orgânicos;

6. Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

04 anos após a esterilização.

www.alur.com.br